



AUTOCLAVE



iClave mini2



ハンドピースにやさしく、内部までしっかり滅菌


高圧蒸気重力置換による高い滅菌力

滅菌前の重力置換工程を従来より増やし、さらにハンドピースの滅菌に適した縦型配置により、蒸気浸透度を高めることで、滅菌力が向上しました。

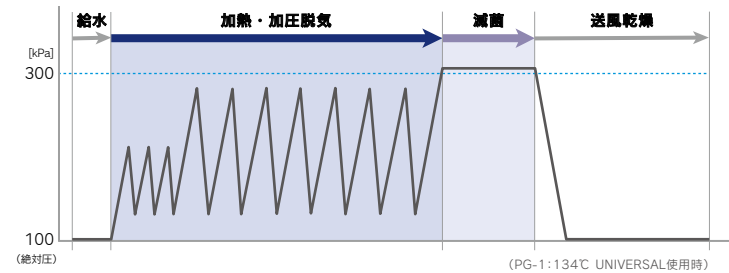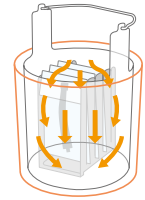

コンパクトサイズで大容量

専用バスケットで、効率の良い配置が可能です。未包装で最大12本、一重包装で最大6本までのハンドピースを一度に滅菌できます。

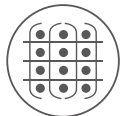

しっかりと滅菌できる直熱ヒートシステム

直熱ヒーターにより、チャンバー内部を効率的に温めます。また、チャンバーをすっぽり覆う一体型の断熱ジャケットにより、熱を効率よく内部に保留。温度ムラが少なく、効率的な加熱を実現。これによりスムーズに滅菌工程へ移行し、効率的な高圧蒸気滅菌を行います。



優れた操作性で、お手入れも簡単

見えやすく、簡単操作のLCDパネル

LCDパネルを採用したことで、視認性が大幅にアップ。用途に合ったプログラムの中から選択し、ボタンを押すだけの簡単操作。また、プログレスバーにより、現在の進行状況や残り時間が一目で分かります。



使いやすさと清掃性が向上したスマートデザイン

LCDパネルを採用したシームレスな外装は、清掃がしやすく、簡単にお手入れが可能です。



残水量表示

着脱式大容量タンクで
給水時間の節約と簡単お手入れ

1回の給水で4回分の滅菌が可能*。使用した水は毎回排水タンクに自動排水します。タンクの残水量は正面から見えやすく、給水タイミングが分かりやすい設計。取り外しも簡単で、タンクの清掃も簡単に行えるため、常に清潔な水の供給が可能です。



分解して水洗い可能

使いやすさと安全性を向上した充実の機能

音声案内によるお知らせ機能

滅菌開始や終了時などを、音声でお知らせします。

🔊 滅菌を開始します


🔊 滅菌が終了しました

通常ロックとインターロックの
二重ロック構造による安全性の向上

内部の圧力が下がらないとロックが解除されないインターロックと、通常のロックの二重ロック構造により、間違えて開けてしまう危険を防ぎます。

自動延長送風乾燥機能

滅菌が完了してもふたを開けるまで送風乾燥状態を延長することが可能。これにより、被滅菌物の乾燥に寄与します。

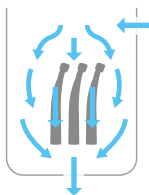

進化した、ハンドピースのための、スマート滅菌器

さらに洗練された、歯科医療へ。

ジャパンメイドの信頼性と、ヨーロッパ基準クラスSに準拠した滅菌性能。そして、使いやすさにこだわったデザイン。ハンドピースメーカーのナカニシが、毎日の施術と安全を考え、ハンドピースのための滅菌器をよりスマートに進化させました。

ヨーロッパ滅菌基準 EN13060 : Class S 準拠



製品名	製品番号	標準価格
iClave mini2 標準セット	Y1500013	¥459,000

セット内容

- iClave mini2ユニット ● 各種基本パーツ
- 仕切りスタンド ● バスケット ● 排水タンク
- 仕切り板(長) × 4 ● 仕切り板(短)

- 仕様 ● 外形寸法(ドア全開時:H) : W 210 × D 370 × H 360 mm (H 600 mm) ● 総重量(ユニット本体) : 17.5 kg
 ● 電源 : AC 100 V 50/60 Hz ● 消費電力 : 750 VA (定格消費電力750 W) ● チャンバー寸法 : φ130 × L 200 mm
 ● チャンバー容量 : 2.5 L ● 給水タンク容量 : 1.5 L ● 排水タンク外形寸法 : W 140 × D 195 × H 234 mm
 ● 排水タンク容量 : 5 L ● 排水ホース : 1.5 m ● ハンドピース滅菌本数目安 : 12本(未包装)、6本(一重包装)

	プログラム	温度	滅菌時間	包装形態
PG-1	134°C UNIVERSAL	134°C	5.5分	一重包装
PG-2	134°C FAST	134°C	3.5分	未包装
PG-3	121°C UNIVERSAL	121°C	35.5分	一重包装
PG-4	121°C FAST	121°C	30.5分	未包装

- UNIVERSAL : 一重包装
FAST : 未包装(滅菌後即時使用)
- 滅菌(STERILIZING)工程の前に、加熱(HEATING)工程が約8~25分かかります。
- 使用する水は、15 μS/cm以下の蒸留水、精製水、純水、または、イオン交換水、RO水のいずれかをご使用ください。
- 送風乾燥時間は(2~90分)の変更が可能です。

滅菌フロー



加熱



直熱ヒートシステムより、チャンバー内部を一気に温めることで、温度ムラが少なく、効率的な加熱をします。

加熱時間
約24分


重力置換



高圧蒸気重力置換による加圧脱気を繰り返し、被滅菌物内の空気を排除します。

重力置換
10回


滅菌

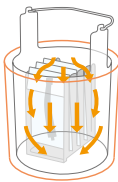

空気をできる限り排除した環境で滅菌を行うことで、機器内部への蒸気浸透度が高まり、より高い滅菌効果が期待できます。


滅菌時間
5.5分

排水

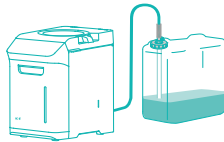

滅菌が完了すると専用の排水タンクへ自動で排水します。

送風乾燥

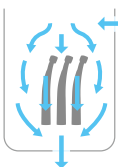

滅菌が終了したら送風乾燥によりチャンバー内の乾燥を促します。さらに、ふたを開けるまで送風乾燥状態を延長する事が可能です。

送風乾燥
時間
10分*

- PG-1: 134°C UNIVERSAL使用時。
- 各項目の記載時間は、あくまでも目安です。
- ※送風乾燥時間は(2-90分)の変更が可能です。

iClave mini2
チュートリアル動画



薬事情報一覧

■エアタービン

販売名：ティーマックス ZT 認証番号：224ALBZX00044000
販売名：エスマックス MT 認証番号：221ALBZX00001000
販売名：エスマックス pico 認証番号：222ALBZX00024000
販売名：ティーマックス X4 5 0 認証番号：222ALBZX00032000

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：picoパー 届出番号：09B2X00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

■コントラアングル

販売名：ティーマックス ZC 認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Z4 5 認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス XC 認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス XS 認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントラアングルハンドピース FXシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース FX6 5 認証番号：222ALBZX00004000
販売名：コントラアングルハンドピース EXシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：コントラアングルハンドピース NRS2 承認番号：22200BZX000204000
販売名：NSK プロフィー AR 認証番号：222ALBZX00027000
販売名：歯根閉塞用ハンドピース EVA 認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ VM 承認番号：20800BZX00726000
販売名：ストレートハンドピース EX - 6 認証番号：219ALBZX00002000

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：エンド用コントラ MP 承認番号：22200BZX00182000
販売名：エンド用コントラ MPAS 承認番号：22200BZX00184000
一般的名称：歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：isoE-ラテックス 届出番号：09B2X00016000150
一般的名称：歯科用口腔内手術灯 一般医療機器

■治療用モーター

販売名：NLX ナノ 認証番号：221ALBZX00015000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ティーマックス X2 0 5 L 認証番号：224ALBZX00027000
販売名：エスマックス M2 0 5 認証番号：222ALBZX00009000
一般的名称：歯科用空気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルハイジーン

販売名：バリオスコンビ Pro 認証番号：229ALBZX00017000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：バリオス 9 7 0 認証番号：223ALBZX00032000
販売名：バリオス 3 7 0 認証番号：223ALBZX00037000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ティーマックス S9 7 0 認証番号：223ALBZX00028000
販売名：S 5 0 ソニックブラシセット 認証番号：222ALBZX00019000
販売名：NSK エアスケーラー用チップ 認証番号：224ALBZX00042000
一般的名称：歯科用エアスケーラー 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：プロフィーメイト neo 認証番号：223ALBZX00029000
販売名：ペリオメイト 認証番号：226ABBZX00023000
一般的名称：電動型機器接続歯面清掃器具 管理医療機器

販売名：フラッシュパール 届出番号：09B2X00016000034
販売名：ペリオメイト パウダー 届出番号：09B2X00016000139
一般的名称：歯面研磨材 一般医療機器

販売名：ペリオメイト ノズルチップ 届出番号：09B2X00016000140
一般的名称：歯科用注入器具 一般医療機器

販売名：アイブローイー 認証番号：226ABBZX00034000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■エンド治療

販売名：エンドメイト TC2 認証番号：222ALBZX00018000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：アイベックスII 認証番号：224ALBZX00015000
一般的名称：歯科用根管長測定器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■訪問診療用機器

販売名：ビバエース 認証番号：227ABBZX00112000
販売名：ビバサボート 2 認証番号：224ALBZX00017000
一般的名称：可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：NLX プラス 認証番号：221ALBZX00019000
販売名：ビバメイト G5 認証番号：223ALBZX00022000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ビバ Q 認証番号：230ALBZX00025000
一般的名称：歯科用吸引装置 管理医療機器

販売名：バリオス 1 7 0 認証番号：223ALBZX00036000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルサージェリー

販売名：ティーマックス X-D SG2 0 L 届出番号：09B2X00016000124
販売名：ティーマックス X-D SG2 0 届出番号：09B2X00016000123
販売名：ティーマックス X-SG 0 L 届出番号：09B2X00016000042
販売名：エスマックス SG2 0 届出番号：09B2X00016000041
販売名：ティーマックス X-SG 届出番号：09B2X00016000137

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：ティーマックス Z-SG4 5 認証番号：226ABBZX00073000
一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージック Pro2 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器

販売名：コントラアングルハンドピース SGM-ER 届出番号：09B2X00016000015
販売名：サージカルハンドピース SGM5-ER 届出番号：09B2X00016000018
販売名：ストレートハンドピース SGS-E 届出番号：09B2X00016000013
販売名：ストレートハンドピース SGS-E2 届出番号：09B2X00016000014
販売名：アングルハンドピース SGA-E 届出番号：09B2X00016000011
販売名：アングルハンドピース SGA-E2 届出番号：09B2X00016000012
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：レシプロハンドピース SGR2-E 届出番号：09B2X00016000020
販売名：オシレートハンドピース SGO2-E 届出番号：09B2X00016000022
販売名：サジタルハンドピース SGT2-E 届出番号：09B2X00016000021
一般的名称：手術用のごり 一般医療機器

販売名：SGR-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000102
販売名：SGQ-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000098
販売名：SGT-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000100
一般的名称：のごり 一般医療機器

販売名：iSD9 0 0 スクリュードライバー 認証番号：222ALBZX00016000
一般的名称：電池電源式骨手術用器械 管理医療機器

販売名：バリオサージ 3 認証番号：225ABBZX00144000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージカル イリゲーションチューブ 認証番号：09B1X00001000023
一般的名称：洗浄キット 一般医療機器

販売名：ソケットリフト ハンドインスツルメント 認証番号：09B2X00016000141
一般的名称：歯科用起子及び剝離子 一般医療機器

販売名：オセオオ 100+ 届出番号：09B2X00016000153
一般的名称：歯接触分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器

■オートクレーブ

販売名：アイクレーブミニ2 認証番号：302ABBZX00049000
一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

■技工用製品

販売名：アルチメイト XL 届出番号：09B2X00016000030
販売名：ポルバーi7 届出番号：09B2X00016000149
一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース 一般医療機器

販売名：プレスト アクア LUX 届出番号：09B2X00016000038
販売名：プレスト アクア II 届出番号：09B2X00016000010
販売名：プレスト II 届出番号：09B2X00016000009
一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース 一般医療機器

KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。

Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。

Bien AirとUNIFLEXは、Bien Air Holding SAの登録商標です。

W&Hは、W&H Deutschland GmbHの登録商標です。

iPad®は、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer, Inc.の登録商標です。