


## ⚠️ パウダー詰まりを防ぐために




接続するまえにカップリング、ハンドピース、パウダーケースのホース接続部、パウダーケース内部、パウダーケースキャップ内部をよく乾燥させてください。

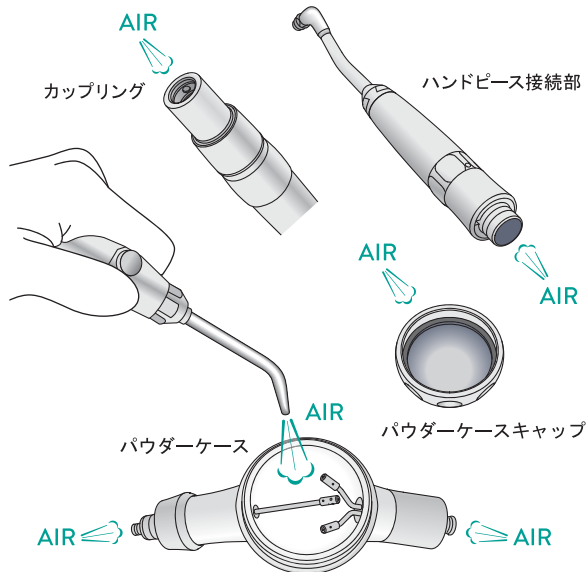

## ノズルチップ着脱の注意


取り付け (取扱説明書 6-6 参照)

ノズルチップがしっかりと取り付けられていない場合、チップが脱落し、誤飲の原因になります。下図を参照の上、奥までしっかり取り付けてください。

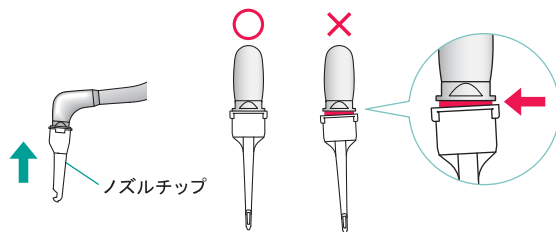

取り外し (取扱説明書 6-6 参照)

ノズルチップの取り外しは、付属のノズルチップリムーバーを使用してください。治療終了後はノズルチップを破棄し、再利用しないでください。

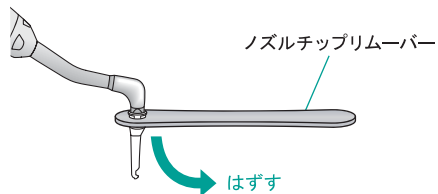

## 治療後のお手入れポイント




### 注意

- 患者の治療終了毎にお手入れを行ってください。(お手入れを怠りますと、パウダー詰まり、水漏れの原因になります)
- 詳細なお手入れの手順は取扱説明書をご確認ください。(取扱説明書7参照)


### パウダーの除去 (取扱説明書7-1、7-2参照)


パウダーケースよりハンドピースを外して、付属のプロアーノズルをカップリングに取り付け、エアのみで空運転し、ハンドピース内のパウダーを排出します。

※ プロアーノズルは購入されたジョイントタイプに応じた物を同梱しています。

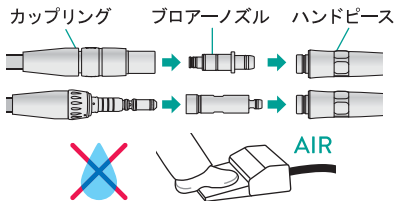


付属のリングレンチでノズルを外し、ノズルの先端にプロアーノズルを接続しエアのみで空運転し、ノズル内のパウダーを排出します。

 空運転する際はノズル、ハンドピースをしっかりと押さえてください。

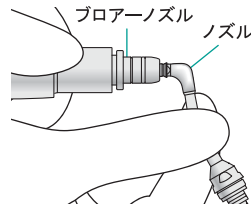


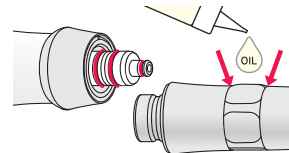
### 清掃 (取扱説明書7-3~7-4参照)

付属の掃除用ブラシを用いて接続部に付着しているパウダーを除去します。

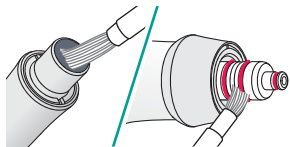

パウダーケースのOリング部、流量調整リング部を乾燥させ、付属のタービン用オイルを1滴たらし、指等でよくなじませます。

 ハンドピース側のOリング部分の注油を怠りますとジョイント部に傷が付き、接続部の回転が重くなったり、水が漏れる等の恐れがあります。



### 超音波洗浄・滅菌 (取扱説明書8-1~8-2参照)

超音波洗浄・滅菌を行う前に分解、清掃して、ハンドピースなどに付着したパウダーを除去してください。最低週に一度、または「故障と対策」に記載された対策後は必ず超音波洗浄を行ってください。




超音波洗浄後はパウダーケースとホースを接続し、エアにて内部の水分を排出し乾燥させてください。


## ご使用のポイント

### 歯肉縁下 (取扱説明書6-6参照)

歯周基本治療の終了した歯肉縁下3mm~6mm未満の歯周ポケット内バイオフィルムの除去。

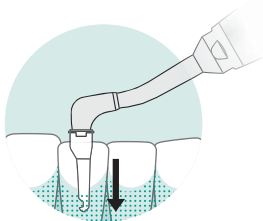


ノズルチップは歯周ポケット底に当てたまま噴射しないでください。

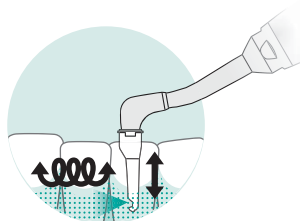

1歯1面約5秒・計20秒までの噴射で効果が得られます。ノズルチップはパウダーの噴射方向に沿って下図のように動かすのがポイントです。


### 歯肉縁上 (取扱説明書6-6参照)

歯肉辺縁 (歯周ポケット内3mm未満まで) のブランク・バイオフィルムの除去

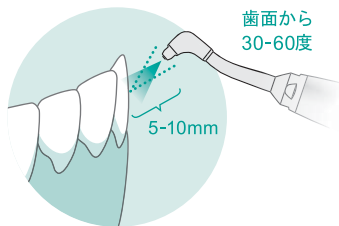

ノズルを歯肉辺縁に向け、図のような距離と角度で噴射を行います。この時、歯面全体にスプレー噴射するように動かすのがポイントです。

広範囲に付着したブランク・バイオフィルム、軽微なステインの除去

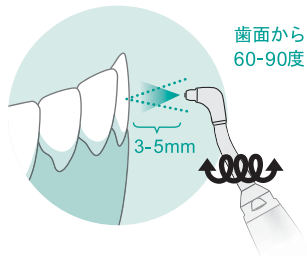

ノズルを歯面に向け、図のような距離と角度で噴射を行います。この時、歯面に対して小さく円を描くように動かすのがポイントです。





## 故障と対策

### パウダー詰まりの解消 (取扱説明書10参照)

ハンドピースからノズルを取り外し、ノズルの根元、先端を、付属の掃除用ワイヤー（小）や掃除用ファイルで清掃します。同様にハンドピース、パウダーケースのハンドピースジョイント部、内部ノズルを付属の掃除用ワイヤー（大）や掃除用ファイルで清掃します。




掃除用ファイルやワイヤーに無理な力を加えないでください。曲がる恐れがあります。

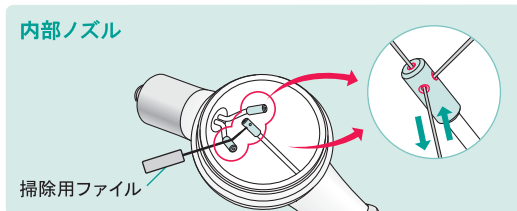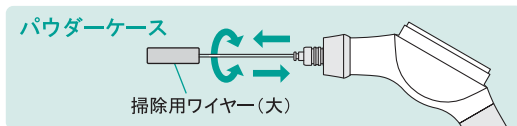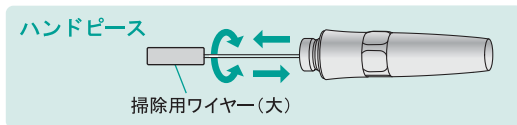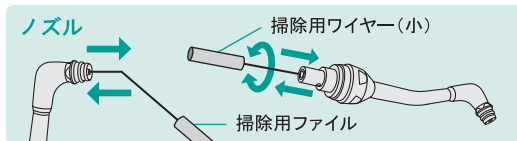

### ハンドピースジョイントからの水漏れの解消 (取扱説明書7-3参照)

パウダーケースのハンドピースジョイント部のリングを交換してください。

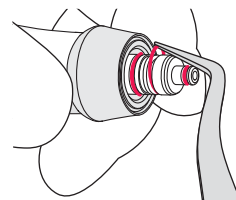

### ⚠ 注意

- ペリオメイトのご使用に際しては取扱説明書をお読みください。
- 取扱説明書とペリオメイトクイックガイドは、ご使用になる方がいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 各処置後、パウダーケース内部や接続部をよく乾燥させてください。

株式会社 **ナカニシ** [www.nsk-nakanishi.co.jp](http://www.nsk-nakanishi.co.jp)

〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL: 0289 (64) 3380 FAX: 0289 (62) 5636

お客様相談窓口 ☎ 0120-7242-56 (9:00~17:00/土日・祝祭日を除く)  
e-mail: [cs@nsk-nakanishi.co.jp](mailto:cs@nsk-nakanishi.co.jp)

本書の内容は、改善のため予告無しに変更することがあります。