

AUTOCLAVE

iClave mini

アイクレーブミニ

ハンドピースメーカーが開発した ハンドピースのための滅菌器、誕生。

ナカニシは世界で信頼されるハンドピースメーカーとして、あらゆる施術で安心してハンドピースをお使いいただけるよう、滅菌器にもこだわりを尽くしたさまざまな先進技術を投入。より安全な歯科治療のための機能をコンパクトに凝縮しました。

ハンドピースに優しく、サイズもコンパクト。
もっと安全で効率の良い歯科治療のために。



乾燥まで最短14分*、一度に最大12本

※予熱の状況により異なります。



電源(100V)をつなぐだけで、
どこでもすぐに使用可能



優れた操作性、お手入れも簡単

ヨーロッパ滅菌基準

EN13060 : Class S 準拠

アイクレーブミニ
iClave mini ヨーロッパ滅菌基準 EN13060 : Class S 準拠

場所を選ばないフレキシブル設計。
 滅菌から乾燥までを、効率良くフルカバー。



乾燥まで最短14分*、一度に最大12本 ※予熱の状況により異なります。

小型滅菌器でも乾燥工程までをフルカバー。ハンドピースに優しく、内側までしっかり滅菌できます。

しっかりと滅菌できる直熱ヒートシステム


直熱ヒーターにより、チャンバー内部を全壁から一気に温めます。また、チャンバーをすっぽり覆う一体型の断熱ジャケットにより、熱を効率よく内部に保留。温度ムラが少なく、効率的な加熱を実現しました。さらに、加圧脱気を繰り返し行うことで、中空のあるハンドピースも内側までしっかり滅菌できます。



ナカニシ独自の乾燥ポンプシステム


専用の乾燥ポンプを採用することで、庫内の温度を冷却し、滅菌後の被滅菌物を過度に高温にしません。水分をすばやく取り除き、滅菌後少ない時間で保管が可能です。ハンドピースにも優しい乾燥システムです。

■使用状況により乾燥が至らない場合があります。使用状況に合わせ乾燥時間を延長、または清潔な場所にて乾燥し切ってから保管してください。

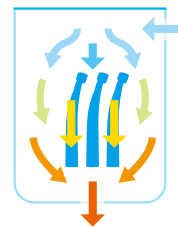

最大12本（一重包装6本）を効率良く
 滅菌できる専用バスケット

庫内のスペースを最大限に活用できるよう工夫された、バスケットとパーテーションツールを用意。滅菌物が重なり合わないよう効率の良い配置が可能で、未包装で最大12本、一重包装で最大6本までのハンドピースを一度に滅菌できます。取り外しができる仕切り板は、インスツルメントの形状や大きさ、またバッグに入れた場合などのさまざまなシチュエーションに合わせて使用可能です。

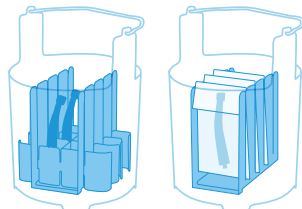

電源（100V）をつなぐだけで、どこでもすぐに使用可能

電源をつなげば、どこでもすぐに滅菌スタート。配管等の追加設備は不要です。

大容量コンパクトサイズ

重量15.5kgの手軽に持ち運べるサイズ。スマートな外観で、クリニックのどんな場所でもフレキシブルに使用できます。また、2.5ℓステンレスチャンバーは、サイズは小さくても大容量の滅菌が可能です。



電源をつなげばどこでも滅菌

簡単セッティングで、電源コードをつなげばすぐに滅菌スタート。配管等の追加設備は全く必要ありません。

手間のかからない内蔵タンクを装備

容量1ℓのタンクを内蔵。循環型なので20～30回*の滅菌が可能で、滅菌ごとに水を入れ替える手間がかかりません。

※ご使用環境により異なります。



優れた操作性、お手入れも簡単

より効果的な滅菌のための使いやすさを追求。毎日のお手入れも簡単です。

見やすく操作しやすいパネル

視認性に優れ、直感的に操作できるパネルで、効率の良い滅菌をサポートします。



ユーザーの使いやすさを考えたデザイン

操作パネル部を含む外側はもちろん、庫内もすっきりとしたフラットデザイン。日々のお手入れもラクに行えます。

簡単な日々のお手入れ

外装、チャンバー内、パッキンまわりを拭くだけ。お手入れに時間をとられません。



iClave mini

ヨーロッパ滅菌基準 EN13060 : Class S 準拠

iClave mini 標準セット

製品名 iClave mini 標準セット
製品番号 Y1002872 標準価格 ¥358,000

- セット内容
- iClave miniユニット • 各種基本パーツ
 - 仕切りスタンド • 交換用水フィルタ
 - バスケット • 交換用給水フィルタ
 - 仕切り板(長)×4 • 交換用エアフィルタ
 - 仕切り板(短) • 交換用パッキン



仕様

- 電源 : AC100 V 50/60 Hz
- 総重量 : 15.5 kg
- 外形寸法 : W210 × D320 × H360 mm
- 消費電力 : 700 W
- チャンバー寸法 : φ130 × 200 mm
- チャンバー容量 : 2.5 ℓ
- タンク容量 : 1.0 ℓ
- ハンドピース滅菌本数目安 : 12本(未包装)
6本(一重包装)

	プログラム	パラメーター	
1	134°C SOLID	134°C	4分
2	134°C POROUS	134°C	14分
3	121°C SOLID	121°C	20分
4	121°C POROUS	121°C	30分

SOLID : 未包装(滅菌後即時使用) POROUS : 一重包装



iClave mini

ヨーロッパ滅菌基準 EN13060 : Class S 準拠