

## FLOW OF STERILIZATION

## メンテナンスガイド【滅菌フロー】

iCare



PANA SPRAY PLUS



iClave mini



## CLEANING・洗浄


## LUBRICATION・注油

## STERILIZATION・滅菌

## STORAGE・保管

一般用

タービン・コントラストレートハンドピース

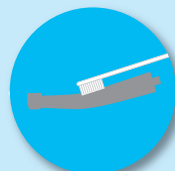


① 表面の汚れをブラシ(金属製は不可)等で払い落とします。但し、血液等が附着している場合は、38℃以下(ぬるま湯)の流水で外装についた血液等を落とします。

エアースケーラー




② 消毒用アルコールを染みこませた綿等で丁寧に拭き取ります。

超音波スケーラー

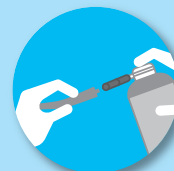

■ パナスプレープラスでの注油  
ハンドピース先端よりオイルが出るまで2~3秒スプレーします。注油は先端から異物等の汚れが出なくなるまで繰り返し行います。

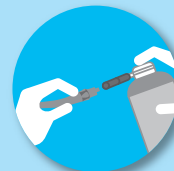

■ S970シリーズへの注油  
① パナスプレープラスまたは自動注油システムiCareによる注油を行います。  
② 注油後はオイルが出なくなるまで空運転を行います。



■ 自動注油システムiCareでの注油  
付属の取扱説明書をよく読んで上で、使用してください。




■ S950シリーズへの注油  
① 付属のタービンオイル2~3滴をエアースケーラーの吸気口に垂らして注油します。  
② 注油後は5秒以上の空運転を行います。

注油を行わないで下さい

外科用

ハンドピース

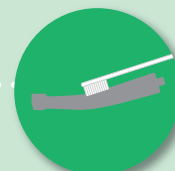

超音波ボンサージェリー

ハンドピース表面の汚れを38℃以下(ぬるま湯)の流水で洗い流します。

※ 外科用ハンドピースは、事前にヘッド部を約20mmの水中に入れ、15秒程度正回転/逆回転させます。(増速コントラを除く)

※ マイクロモーターは、事前にプロテクションプラグを取り付けます。

マイクロモーター



① 2~3秒のスプレーを2~3回繰り返します。  
② 先端から汚れたオイルが出なくなるまで繰り返し注油を行います。  
③ ハンドピースをスタンド等に立てかけるなどして、余分なオイルを除去します。

注油を行わないで下さい

注油を行わないで下さい

滅菌パック、または専用滅菌ケースにハンドピース、モーター、チップなどを収納し、蓋を閉め(または封印し)、オートクレーブ滅菌を行います。

滅菌終了後は専用滅菌ケース(または滅菌パック)のまま清潔な場所で保管します。



このマークが付いているナカニシ製ハンドピース/モーターは熱水洗浄器(ジェットウォッシャー)による洗浄/消毒に対応しています。ご使用の熱水洗浄器の取扱説明書に従って行って下さい。



このマークの付いているナカニシ製ハンドピース/モーターは最大135℃までの繰り返し滅菌に対応しています。

滅菌フローの詳細はウェブサイトをご確認ください。  
[www.japan.nsk-dental.com/support/maintenance/](http://www.japan.nsk-dental.com/support/maintenance/)