


Create it 

TIP GUIDE

ULTRASONIC SCALER


NSK

チップの数だけ 臨床の幅が広がります

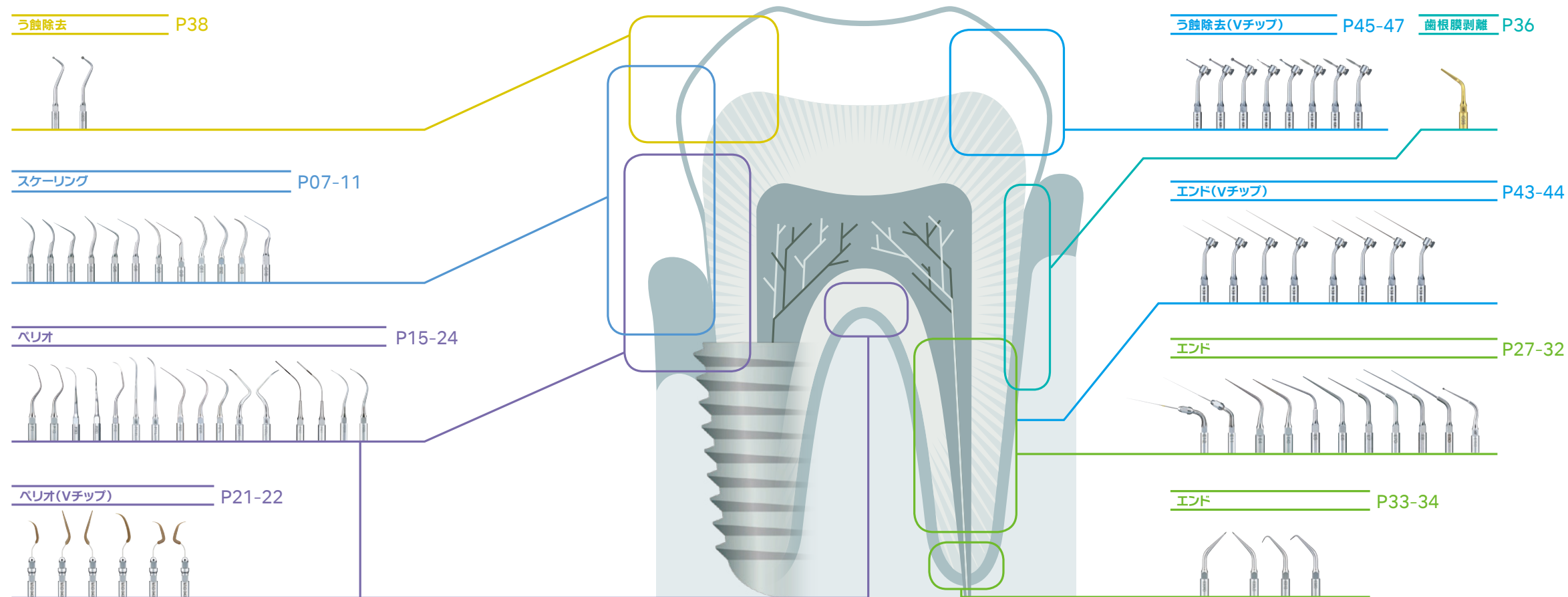

Ultrasonic Scaler Tips

ナカニシの超音波スケーラーチップラインナップは、幅広い症例に対応しています。Varios2、Variosハンドピースのどちらにもご使用いただけます。

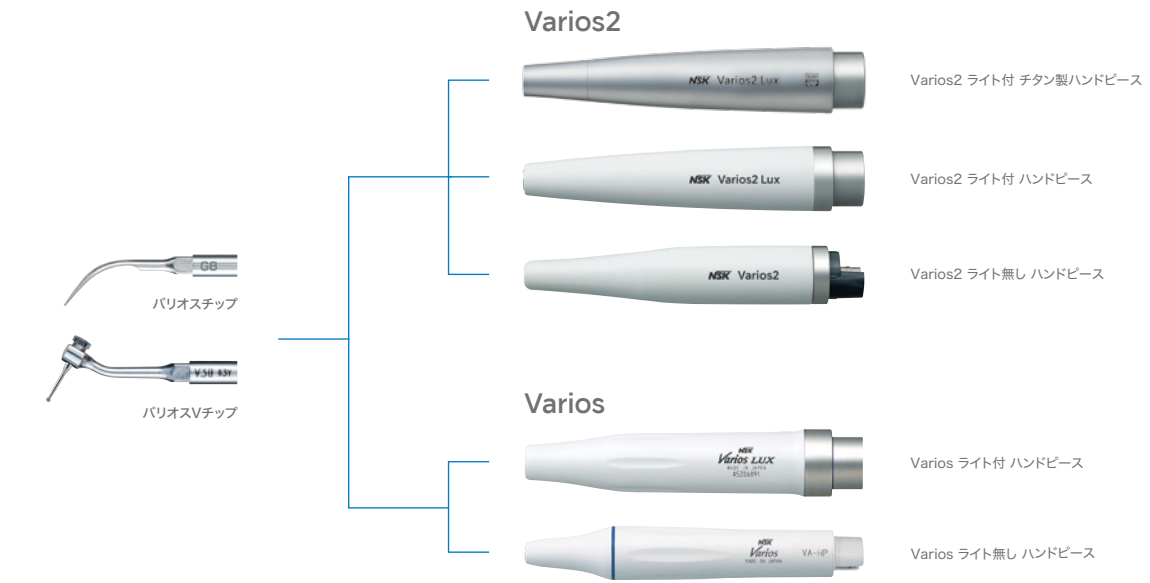


■パリオス用のチップは下記の承認品目に含まれています。									
販売名：パリオスコンビ Pro	認証番号：229ALBZX00017000	販売名：パリオス 750	医療機器承認番号：21500BZZ00683000	販売名：パリオス ビルトインモジュール	医療機器承認番号：21500BZZ00172000				
販売名：パリオス 970	認証番号：223ALBZX00032000	販売名：パリオス 560	医療機器承認番号：21700BZZ00247000	販売名：パリオス ビルトインモジュール LUX	医療機器承認番号：21600BZZ00104000				
販売名：パリオス 370	認証番号：223ALBZX00037000	販売名：パリオス 350 LUX	医療機器承認番号：21400BZZ00444000	一般的名称：歯科用多目的超音波治療器	管理医療機器 特定保守管理医療機器	※チップは特定保守管理医療機器非該当			
販売名：パリオス 170	認証番号：223ALBZX00036000	販売名：パリオス 350	医療機器承認番号：21400BZZ00443000						
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器									

超音波スケーラーを正しく使うコツ

パリオスシリーズを使用した場合、超音波振動とキャビテーション効果により、歯石沈着物とバイオフィルムの破壊と除去を効率良く行うことができます。その効果を最大限に活かすための「4つのポイント」をご紹介します。


POINT 1 チップの当て方

パリオスシリーズはピエゾタイプの超音波スケーラーで、チップが前後に直線的な動き(往復運動)をしています。またチップは部分によってパワーが異なり、先端部分にパワーがもっとも強く発揮されるよう設計されているので、チップのどの部分を当てるかによって効果と歯面への影響も異なります。通常は、チップ先端から2mm～3mmまでの側面を当てることでもっとも効果的に使用することができます。

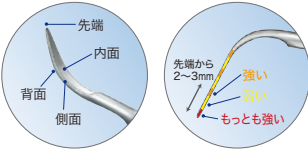


POINT 2 チップの角度

歯面に対してチップを約15°の角度にすることで、チップの先端から2mm～3mmを当てることができます。チップは歯面に対して当てる角度が開くほど、先端のパワーの強い部分のみが当たり衝撃が大きくなるので、歯面や患者さまへ負担が大きくなるおそれがあります。

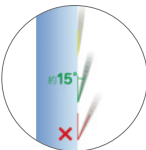


POINT 3 当てる強さと動かし方

チップを当てる強さはフェザータッチで、チップ先端を歯面から離さず細かく動かし続けることで、超音波の振動を最大限に活用することができます。強固に付着した大きい歯石などを除去する場合には、歯石をチップ先端のパワーがもっとも強い部分で「歯石を叩いて崩す」イメージで動かすことで効率良く使用することができます。「必要以上に圧を加える」「歯面から動かさずに一箇所にのみ当て続ける」と歯面へのキズや、患者さまへ痛みを与えてしまう可能性があります。また、超音波の振動を上手く活用できなくなる場合もありますので注意しましょう。

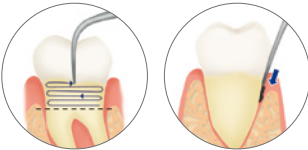


POINT 4 パワー設定

付着物の状態に合わせてパワー設定を行うことが大切です。パリオスシリーズでは各チップの使用最大パワーを表示しております。初めから強いパワーで使用するのではなく、口腔内の状況に合わせて低いパワーから徐々に設定を上げていくことをお勧めいたします。

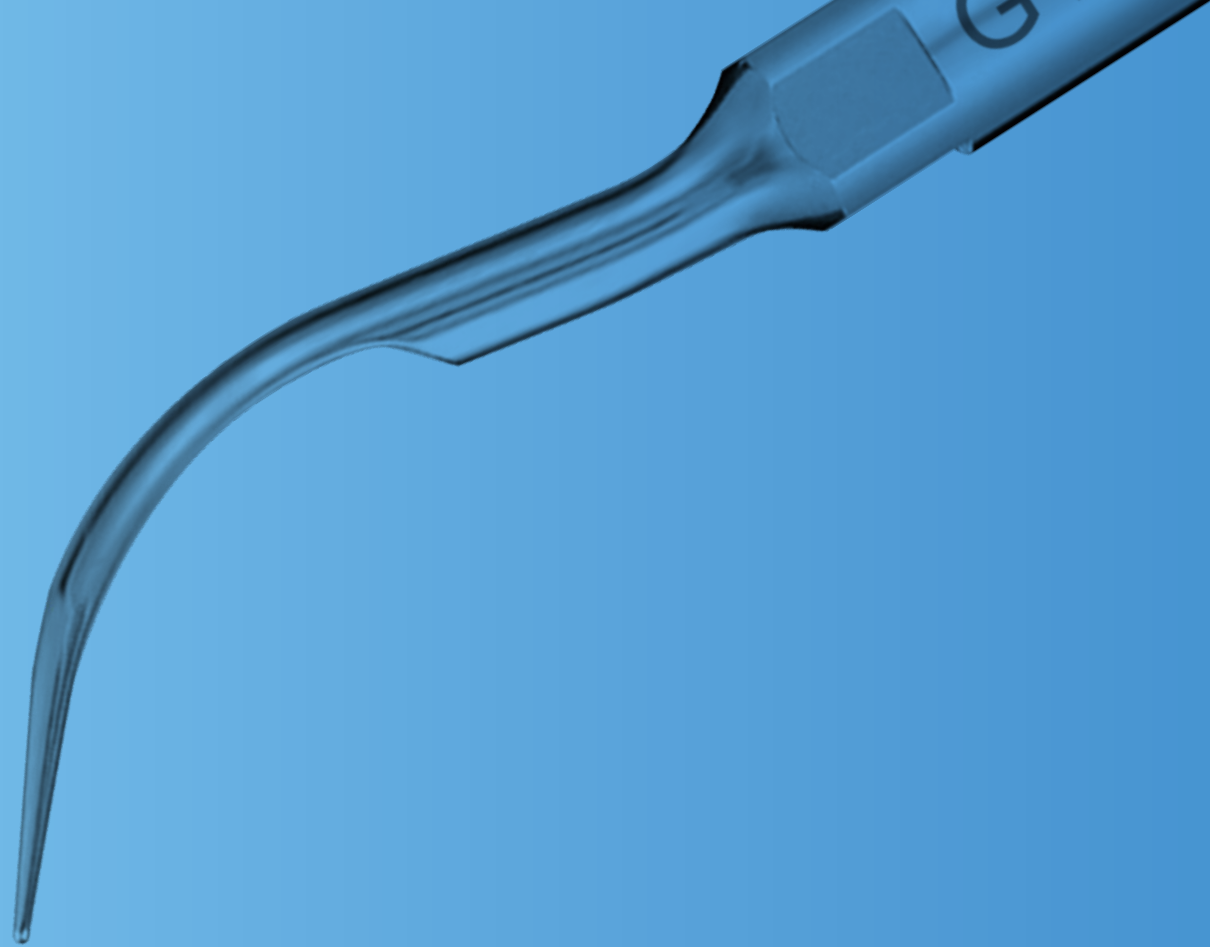


SCALING

SCALING

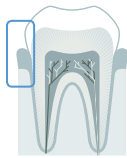

製品名 **G1**

歯肉縁上、歯間部の除石に適したチップです。

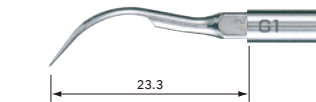

標準価格 **¥8,400** 製品番号 **Z217101**

• お得な「スケーリングチップ プラス1パック」もあります。→ **P11**



製品名 **G2**

歯肉縁上に付着した大量の歯石やステイン除去に適したチップです。




標準価格 **¥8,400** 製品番号 **Z217102**



製品名 **G3**

歯肉縁上に付着した大量の歯石やステイン除去に適したチップです。

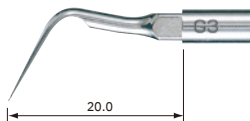

標準価格 **¥8,400** 製品番号 **Z217103**



断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の4倍)

製品名 **G4**

先端が細く歯肉辺縁や歯間部の除石に適したチップです。断面が丸く歯面にキズも付きにくいので歯面の仕上げにも適しています。



標準価格 **¥8,400** 製品番号 **Z217104**


• お得な「スケーリングチップ プラス1パック」もあります。→ **P11**



チップは必ず指定されたパワーの範囲でご使用ください。(P49-50参照)

製品名 **G5**

臼歯部、歯間部などの除石に適したチップです。

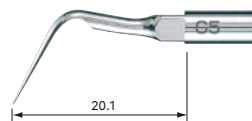

標準価格 **¥8,400** 製品番号 **Z217105**



製品名 **G6**

歯肉縁上、縁下の除石に適したチップです。狭い歯間部などにも無理なくアクセスできます。




標準価格 **¥9,500** 製品番号 **Z217106**

• お得な「スケーリングチップ プラス1パック」もあります。→ **P11**




SCALING

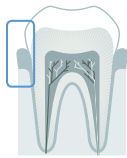

製品名 **G8**

歯肉縁上の除石に適したチップです。断面が半円状なので、歯肉へのダメージを与えにくく、高いパワーで 사용할 ことができるチップです。

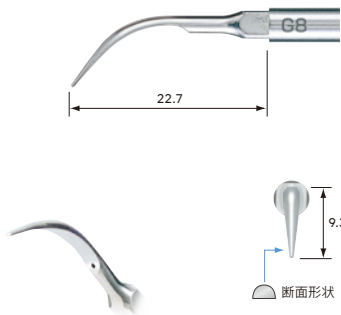


標準価格 **¥8,400** 製品番号 **Z217108**

• お得な「スケーリングチップ プラス1パック」もあります。→ **P11**



製品名 **G9**

歯肉縁上、縁下の除石に適したチップです。狭い歯間部などにも無理なくアクセスできます。

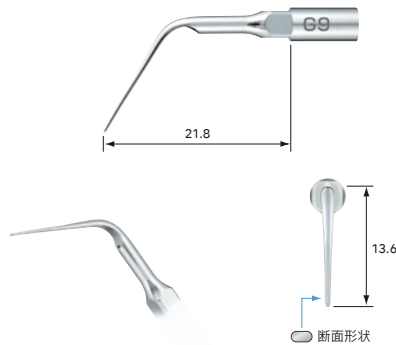


標準価格 **¥9,500** 製品番号 **Z217109**

• お得な「スケーリングチップ プラス1パック」もあります。→ **P11**



製品名 **G11**

歯肉縁上の除石に適したチップです。断面がひし形なので、エッジを当てることにより効率よく除石ができます。

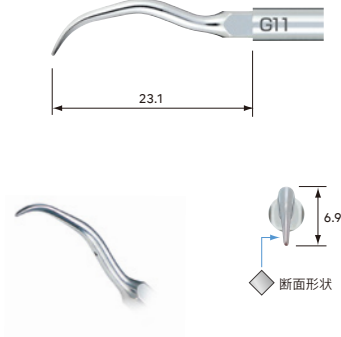


標準価格 **¥8,400** 製品番号 **Z217411**



断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の4倍)

製品名 **G12**

歯肉縁上の除石に適したチップです。断面がひし形なので、エッジを当てることにより効率よく除石ができます。

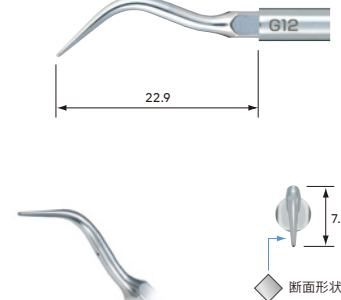


標準価格 **¥8,400** 製品番号 **Z217412**



チップは必ず指定されたパワーの範囲でご使用ください。(P49-50参照)

製品名 **G13**

歯肉縁上の除石に適したシクルスケーラータイプの形態をしたチップです。断面がひし形なので、エッジを当てることにより効率よく除石ができます。

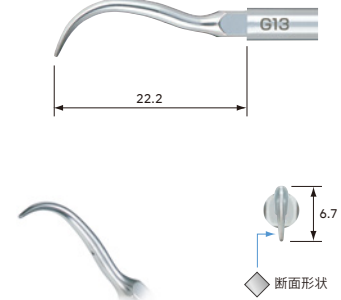


標準価格 **¥8,400** 製品番号 **Z217413**



製品名 **G16**


歯肉縁上、縁下の除石に適したチップです。狭い歯間部などにも無理なくアクセスできます。

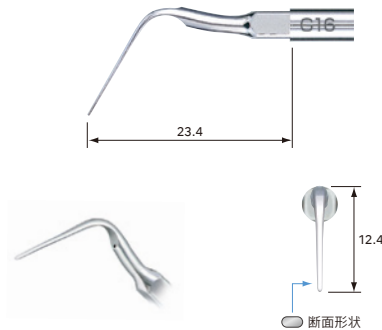

標準価格 **¥9,500** 製品番号 **Z217120**


• お得な「スケーリングチップ プラス1パック」もあります。→ **P11**
• Varios2ハンドピース専用



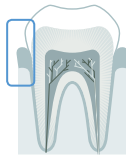

スケーリングチップ プラス 1パック

チップ6本を、5本分の価格でご購入いただけます。

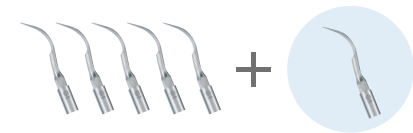

製品名 **スケーリングG1パック** • G1 : 6本入

標準価格 **¥42,000** 製品番号 **Y900501**



製品名 **スケーリングG6パック** • G6 : 6本入

標準価格 **¥47,500** 製品番号 **Y900503**




製品名 **スケーリングG9パック** • G9 : 6本入

標準価格 **¥47,500** 製品番号 **Y1002164**



製品名 **スケーリングG4パック** • G4 : 6本入

標準価格 **¥42,000** 製品番号 **Y900502**

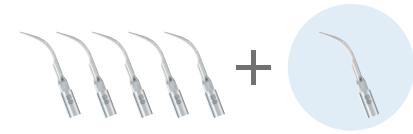


製品名 **スケーリングG8パック** • G8 : 6本入

標準価格 **¥42,000** 製品番号 **Y1002163**




製品名 **スケーリングG16パック** • G16 : 6本入

標準価格 **¥47,500** 製品番号 **Y1003898**

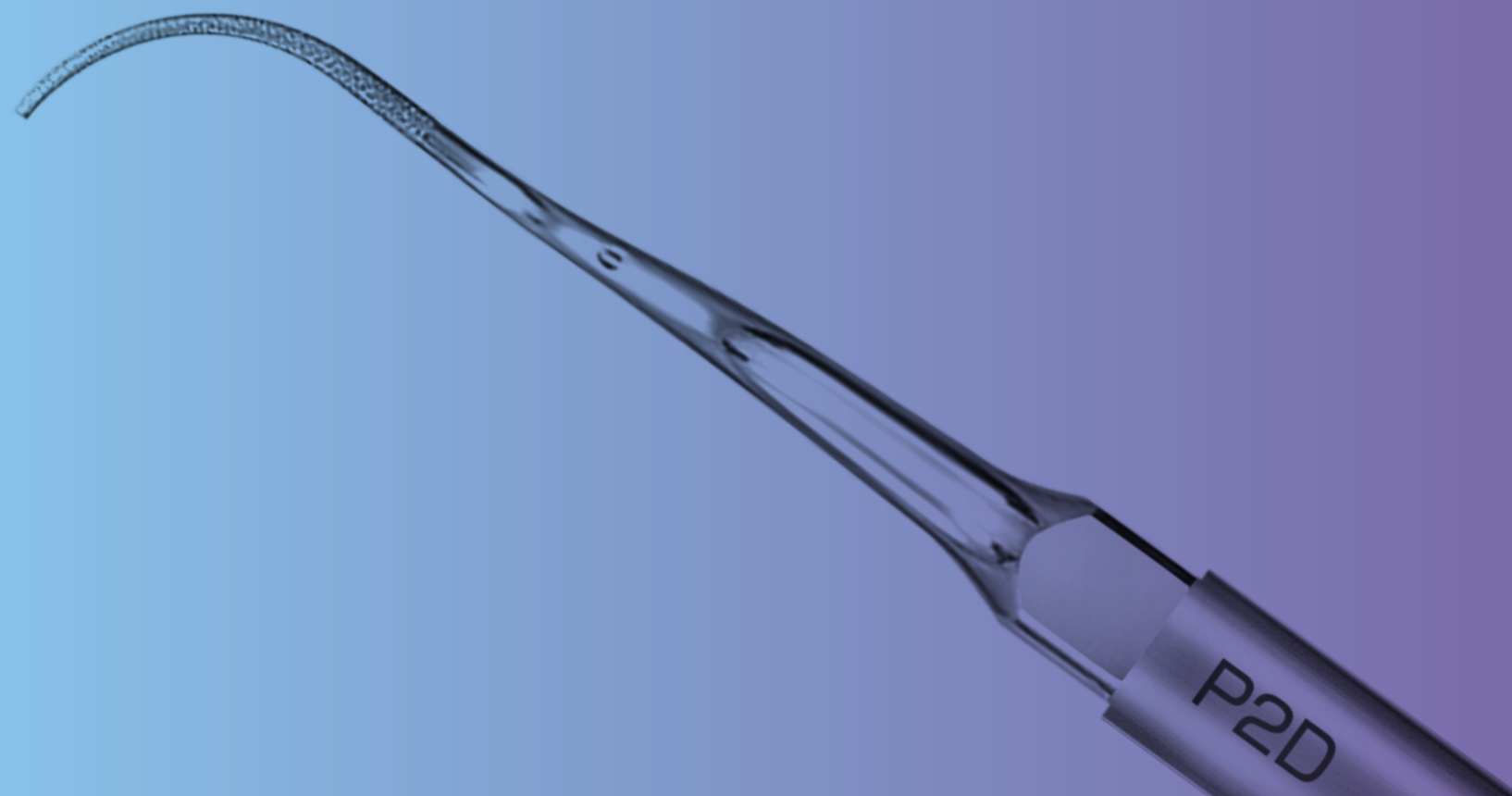


PERIO

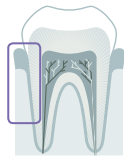

製品名 **P1**

前歯から小臼歯のメインテナンス、スケーリングの仕上げに適したストレートタイプの形態をしたチップです。とても細いので隣接面・叢生部へも無理なくアクセスできます。


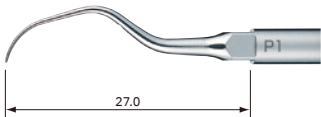


標準価格 **¥9,000** 製品番号 **Z217404**



製品名 **P1D**

P1チップにダイヤモンドコーティングを施したタイプのチップです。根近接部位・叢生部などの操作しにくい部位のハードプラークの除去にも適しています。

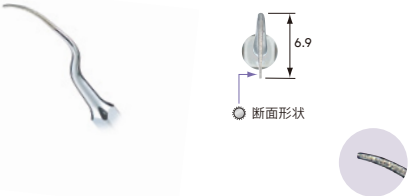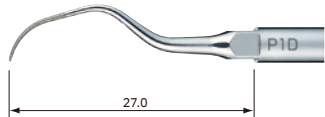

標準価格 **¥9,000** 製品番号 **Z217405**


・ダイヤモンドコーティング



断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の4倍)

製品名 **P2D**

ダイヤモンドコーティングを施した複屈曲型のチップです。主に臼歯部の近遠心の操作に適しています。

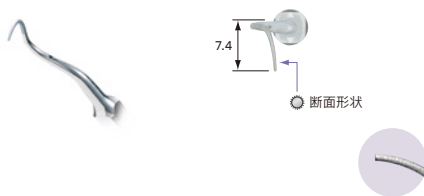

標準価格 **¥9,000** 製品番号 **Z217402**



・ダイヤモンドコーティング・右湾曲タイプ



チップは必ず指定されたパワーの範囲でご使用ください。(P49-50参照)

製品名 **P3D**

ダイヤモンドコーティングを施した複屈曲型のチップです。主に臼歯部の近遠心の操作に適しています。

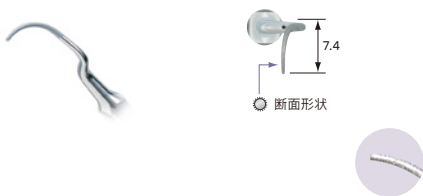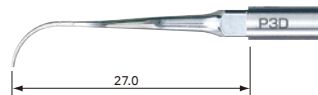


標準価格 **¥9,000** 製品番号 **Z217403**

・ダイヤモンドコーティング・左湾曲タイプ



P2D / P3D (真上)



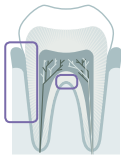

製品名

P10

ポケット内へのアクセスがスムーズに行えるので全顎的に使用でき、硬い歯石の除去などに効果的なチップです。

標準価格

¥9,000

製品番号

Z217410

• シャープエッジ
• お得な「ペリオチップ プラス1パック」もあります。➔P24

製品名

P11R

キュレットスケーラーの屈曲形態を参考に設計した形状で、前歯部の狭いポケットから臼歯部の隣接歯間部へのアプローチもスムーズに行え、強固に付着した緑下歯石の除去などに効果的なチップです。

標準価格

¥9,000

製品番号

Z217408

• シャープエッジ
• 右湾曲タイプ

製品名

P11L

標準価格

¥9,000

製品番号

Z217409

• シャープエッジ
• 左湾曲タイプ

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の4倍)

製品名

P20

断面が丸く歯面にキズが付きにくいのでメンテナンスや仕上げに適しています。細長い形態でポケット内へのアクセスがスムーズに行える全顎的に使用できるチップです。

標準価格

¥9,000

製品番号

Z217420

• お得な「ペリオチップ プラス1パック」もあります。➔P24

製品名

P21R

断面が丸く歯面にキズが付きにくいのでメンテナンスや仕上げに適しています。緩やかに湾曲した形態で、臼歯部の隣接面へのアクセスが行いやすいチップです。

標準価格

¥9,000

製品番号

Z217422

• 右湾曲タイプ

製品名

P21L

標準価格


¥9,000

製品番号

Z217421

• 左湾曲タイプ

チップは必ず指定されたパワーの範囲でご使用ください。(P49-50参照)

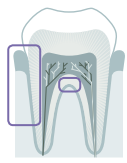

製品名 **P25R**

根分岐部のバイオフィルム除去、残存歯石の除去に適したチップです。




標準価格 **¥9,000** 製品番号 **Z217424**

• 右湾曲タイプ



製品名 **P25L**

根分岐部のバイオフィルム除去、残存歯石の除去に適したチップです。

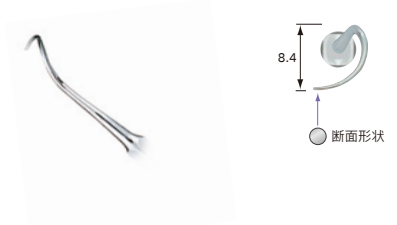


標準価格 **¥9,000** 製品番号 **Z217425**

• 左湾曲タイプ




P11R / P11L / P21R / P20 / P21L (真上)

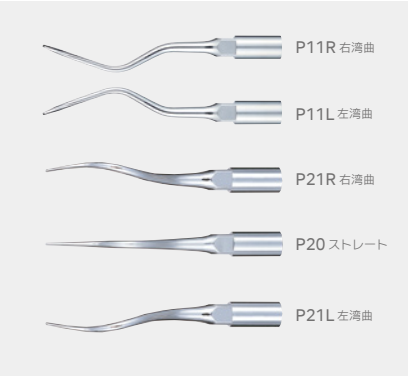

断面形状: チップ先端より1mmの形状(原寸の4倍)

製品名 **P26R**

複屈曲型シャープエッジタイプなので、強固に付着した縁下歯石の除去に適したチップです。第一シャンクが長いので、狭い歯間部や分岐部、複雑な根面での操作がスムーズに行えます。

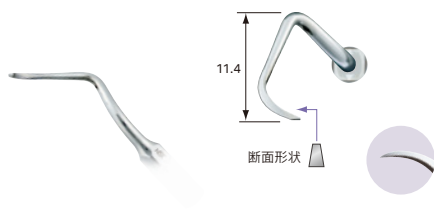

標準価格 **¥9,000** 製品番号 **Z217426**

• シャープエッジ • 右湾曲タイプ



チップは必ず指定されたパワーの範囲でご使用ください。(P49-50参照)

製品名 **P26L**

根分岐部のバイオフィルム除去、残存歯石の除去に適したチップです。



標準価格 **¥9,000** 製品番号 **Z217427**


• シャープエッジ • 左湾曲タイプ



P25R / P25L / P26R / P26L (真上)



ナカニシのペリオコントロールチップはプラスチック素材を使用しているため、補綴装置・修復物へのキズを最小限に抑えて付着物を除去することができます。超音波スケーラーならではのスピーディーな施術は、患者さまへの負担も軽減します。

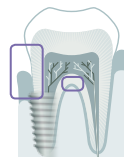

断面形状: チップ先端より1mmの形状(原寸の4倍)




チップは必ず指定されたパワーの範囲でご使用ください。(P49-50参照)

PERIO

イリゲーションにより炎症の抑制や細菌数を低下させることができます。チップ先端から6mmのところに3mm幅のガイドラインがマーキングされているので、ポケットの深さや目的に合わせ、容易に挿入できます。特に歯周ポケット、歯根分岐部の洗浄に効果的です。※除石効果はありません。

製品名	P40	製品名	P41
-----	-----	-----	-----


チップの先端から6mmのところに3mm幅のガイドラインマーキングを施していますので、ポケットの深さや目的に合わせ、容易に挿入できます。

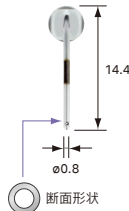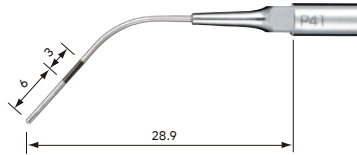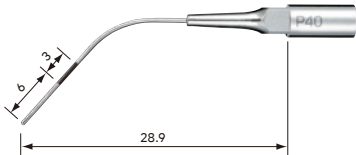

標準価格	¥6,600	製品番号	Z217550	標準価格	¥6,600	製品番号	Z217555
------	--------	------	---------	------	--------	------	---------

- チップφ0.6mm
- チップφ0.8mm

2孔注水
先端側方部2点より
注水される2孔注水。

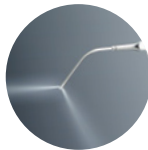

臨床動画

PERIO

ペリオキット A



標準価格	¥36,000	製品番号	Y900144
------	---------	------	---------

- P1D、P2D、P3D、P10：各1本入
- チップホルダー付属

ペリオキット B



標準価格	¥27,000	製品番号	Y900145
------	---------	------	---------

- P20、P25R、P25L：各1本入
- チップホルダー付属

ペリオチップ プラス 1パック

チップ6本を、5本分の価格でご購入いただけます。




製品名	ペリオP10パック	• P10：6本入
-----	-----------	-----------

標準価格	¥45,000	製品番号	Y900504
------	---------	------	---------





製品名	ペリオP20パック	• P20：6本入
-----	-----------	-----------

標準価格	¥45,000	製品番号	Y900505
------	---------	------	---------

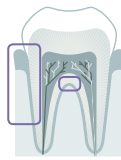


ENDODONTICS

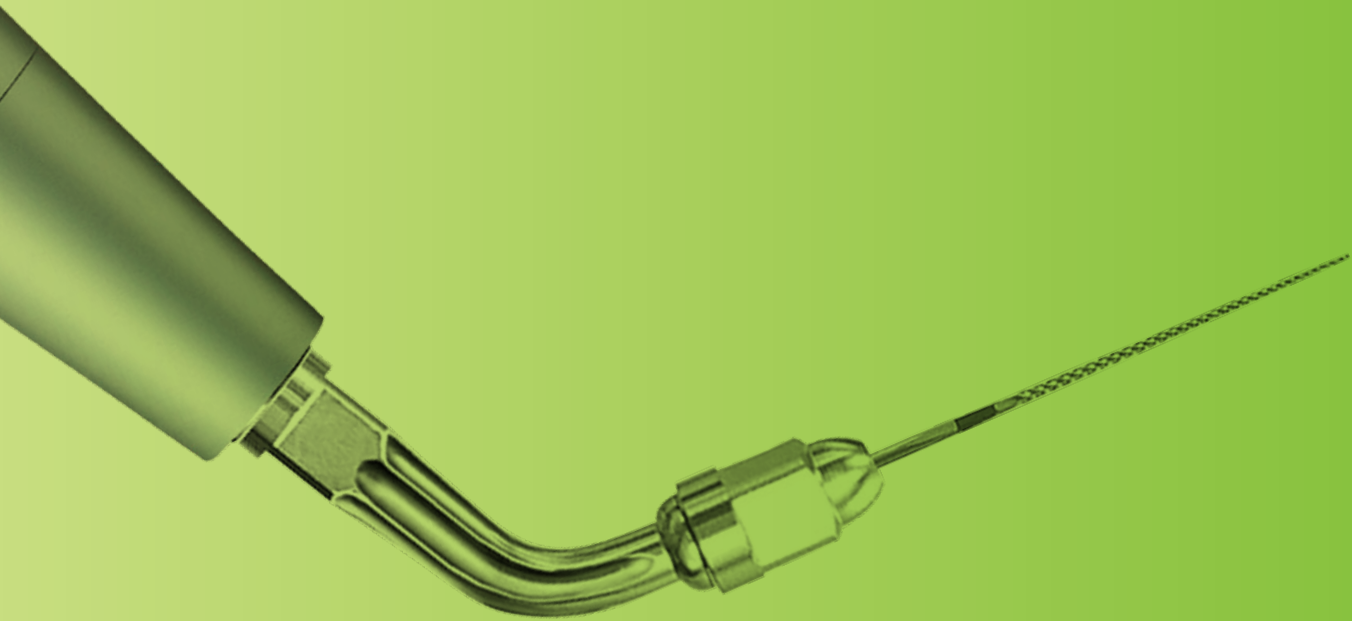

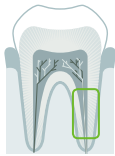


製品名 **E4**

根管内洗浄用チップ。根管内異物除去用としても使用できます。

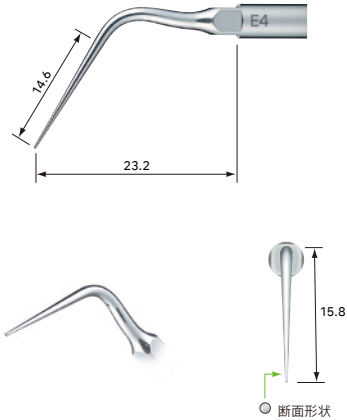

標準価格 **¥7,600** 製品番号 **Z217428**

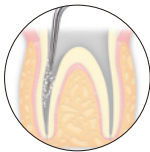


製品名 **E7**

根管充填剤(材)充填・除去用チップ。長さが16mmの短いタイプです。超音波の振動により充填・除去します。



標準価格 **¥7,600** 製品番号 **Z217307**

- ドライ仕様

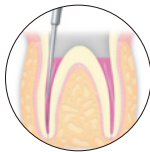

製品名 **E8**

根管充填剤(材)充填・除去用チップ。長さが26mmの長いタイプです。超音波の振動により充填・除去します。




標準価格 **¥7,600** 製品番号 **Z217308**

- ドライ仕様

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の4倍)

製品名 **E4D**

根管口拡大用のチップ。ダイヤモンドコーティングを施しており、根管内洗浄も行うことができます。

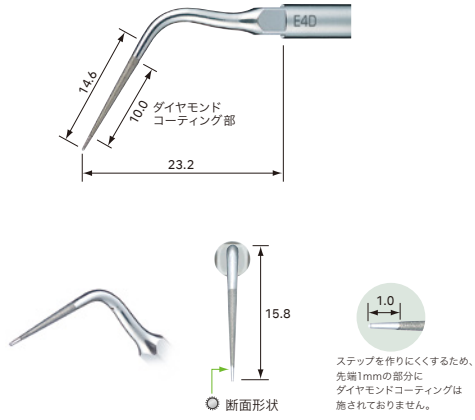

標準価格 **¥9,000** 製品番号 **Z217528**

- ダイヤモンドコーティング

チップは必ず指定されたパワーの範囲でご使用ください。(P49-50参照)


製品名 **E7D**

根管拡大・形成用チップ。作業長が13mmの短いタイプです。根管口拡大や根管内洗浄も行うことができます。



標準価格 **¥9,000** 製品番号 **Z217317**

- ダイヤモンドコーティング

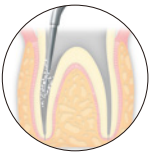


製品名 **E8D**

根管拡大・形成用チップ。作業長が23mmの長いタイプです。根管口拡大や根管内洗浄も行うことができます。



標準価格 **¥9,000** 製品番号 **Z217318**

- ダイヤモンドコーティング

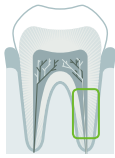


製品名 **E5**

充填用チップ。作業長が17mmの細いタイプです。超音波の振動により充填時の効果を高めます。



標準価格 **¥7,600** 製品番号 **Z217305**

- ドライ仕様

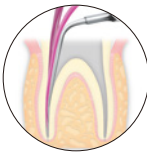


製品名 **E6**

充填用チップ。作業長が20mmの太いタイプです。超音波の振動により充填時の効果を高めます。



標準価格 **¥7,600** 製品番号 **Z217306**

- ドライ仕様

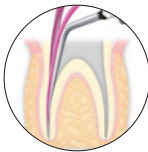

断面形状: チップ先端より1mmの形状(原寸の4倍)

製品名 **E15D**

先端部がダイヤモンドコーティングを施した球状になっており、根管内の形成、根管口の探索に適しています。




標準価格 **¥10,000** 製品番号 **Z217319**

- ダイヤモンドコーティング





チップは必ず指定されたパワーの範囲でご使用ください。(P49-50参照)

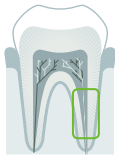

製品名 **E11**

Uファイル用ホルダーです。120°の角度があるタイプで、前歯部に適しています。

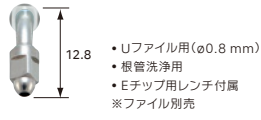
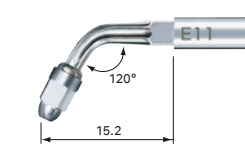


- Uファイル用(φ0.8 mm)
- 根管洗浄用
- Eチップ用レンチ付属
- ※ファイル別売

標準価格 **¥10,000** 製品番号 **Z217031**

製品名 **E12**

Uファイル用ホルダーです。95°の角度があるタイプで、臼歯部に適しています。

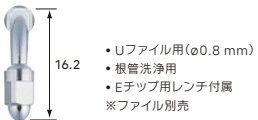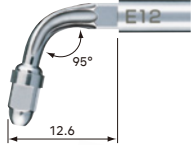


- Uファイル用(φ0.8 mm)
- 根管洗浄用
- Eチップ用レンチ付属
- ※ファイル別売

標準価格 **¥10,000** 製品番号 **Z217032**

【使用時の取り付け長】 お手持ちのハンドピースロゴをご確認ください。

		ISO 15	ISO 20	ISO 25	ISO 30	ISO 35
E11	Varios2	22 mm	24.5 mm	22 mm	22 mm	22 mm
	Varios	22-23 mm	22-23 mm	23-25 mm	23-25 mm	24-26 mm
E12	Varios2	22 mm	24.5 mm	24.5 mm	24.5 mm	22 mm
	Varios	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm

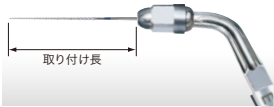


製品名 **Uファイル**

長さ 33mm シャンク φ0.8mm

製品名	Uファイル 33mm ISO 15	• 6本入
標準価格	¥1,600	製品番号 Y900062
製品名	Uファイル 33mm ISO 20	• 6本入
標準価格	¥1,600	製品番号 Y900063
製品名	Uファイル 33mm ISO 25	• 6本入
標準価格	¥1,600	製品番号 Y900064
製品名	Uファイル 33mm ISO 30	• 6本入
標準価格	¥1,600	製品番号 Y900065
製品名	Uファイル 33mm ISO 35	• 6本入
標準価格	¥1,600	製品番号 Y900066


製品名 **エンドキット E11**

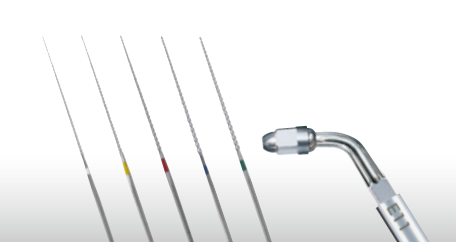

標準価格 **¥16,400** 製品番号 **Y900146**

- E11(120°) • Eチップ用レンチ付属
- Uファイル33mm ISO15、ISO20、ISO25、ISO30、ISO35 : 各6本入

製品名 **エンドキット E12**

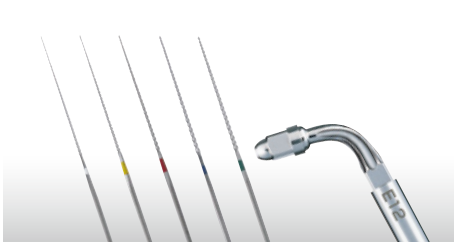

標準価格 **¥16,400** 製品番号 **Y900147**





- E12(95°) • Eチップ用レンチ付属
- Uファイル33mm ISO15、ISO20、ISO25、ISO30、ISO35 : 各6本入

RETROGRADE ENDO

歯根端切除術における、逆根管充填窩洞の形成に用いるチップです。部位や挿入角度に合わせて4種類をラインナップしました。

製品名	E30RD	製品名	E30LD
-----	-------	-----	-------

根尖の切除後、逆根管充填窩洞の形成に適したダイヤモンドコーティングを施しているチップです。

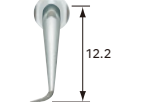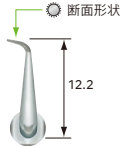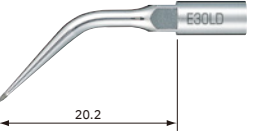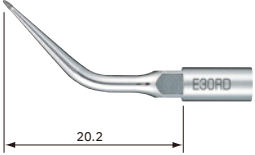

標準価格

¥10,000

製品番号

Z217212

標準価格

¥10,000

製品番号


Z217213

- ダイヤモンドコーティング
 - 右曲がり
- ダイヤモンドコーティング
 - 左曲がり



製品名	E31D	製品名	E32D	製品名	レトロキット
-----	------	-----	------	-----	--------

先端角度70°のチップです。前歯のバックアクション、臼歯部に適しています。

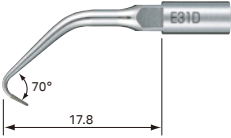

標準価格



¥10,000

製品番号

Z217210

- ダイヤモンドコーティング
- 先端角度70°

先端角度90°のチップです。前歯部に適しています。

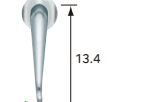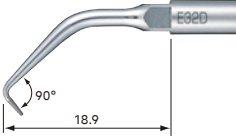

標準価格

¥10,000

製品番号

Z217211

- ダイヤモンドコーティング
- 先端角度90°


製品名	レトロキット
-----	--------



標準価格	¥40,000	製品番号	Y900149
------	---------	------	---------


- E30RD、E30LD、E31D、E32D：各1本入
- チップホルダー付属

EXTRACTION

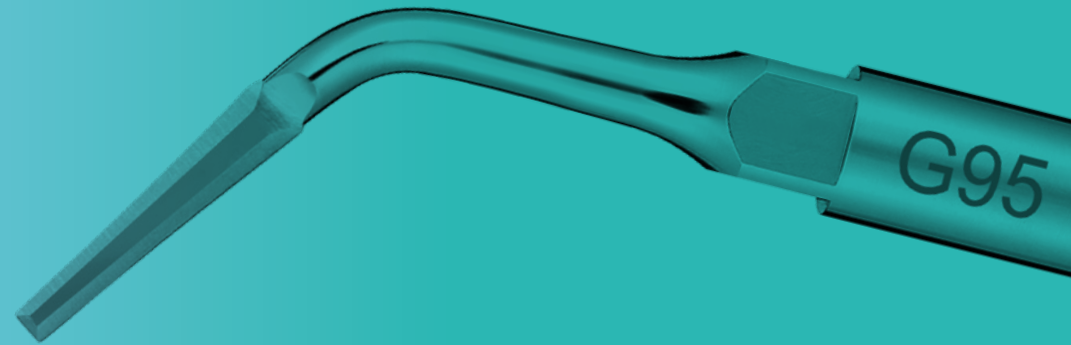



EXTRACTION (歯根膜剥離)

チップ先端および両側面が鋭いエッジになっているので、チップを無理なく挿入することができます。このチップを使用して歯根膜を剥離することで歯槽骨を損傷するリスクが低くなります。

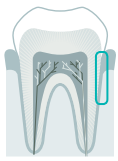

製品名 **G95**


薄いチップ先端形状と両側面の鋭いエッジ形状により無理なくチップを挿入することができます。
また、ヘーベルなどと異なり、抜歯窩の窩壁の損傷を抑えます。

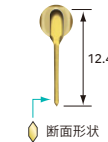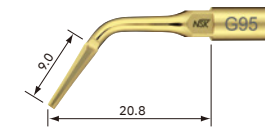

【ご使用上の注意】



水を根尖に送り込むようなイメージでチップを動かしてください(軽いポンピング動作)。

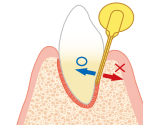

歯槽骨の損傷を防ぐため、できるだけチップ先端を歯牙に沿わせて動かしてください。

標準価格 **¥16,000**

製品番号 **Z217705**


• チタンコーティング • 厚さ : 0.7 mm • 3方向がシャープな両刃

残根抜歯(上顎左2番抜歯)



イメージ

半埋伏歯(下顎左8番抜歯)

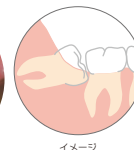

イメージ

※力を入れすぎないように注意してください。



臨床動画

チップは必ず指定されたパワーの範囲でご使用ください。(P49-50参照)

断面形状: チップ先端より1mmの形状(原寸の4倍)


写真提供: 西川歯科クリニック(埼玉県川口市)

RESTORATIVE



RESTORATIVE


超音波振動を利用した研削により、修復処置が可能で、健康な歯質を必要な範囲で残すことが可能です。

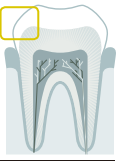

製品名 **G61D**

製品名 **G62D**

ラウンド形状のダイヤモンドコーティングを施したチップです。歯頸部付近や根面にできたう蝕でも、軟組織への損傷リスクを少なく研削が可能です。

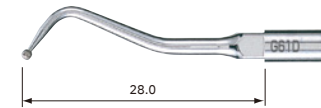

標準価格 **¥12,600**

製品番号 **Z217601**

• ダイヤモンドコーティング • チップ先端φ1.2 mm

標準価格 **¥12,600**


製品番号 **Z217602**

• ダイヤモンドコーティング • チップ先端φ1.6 mm



チップは必ず指定されたパワーの範囲でご使用ください。(P49-50参照)

V-TIP SYSTEM

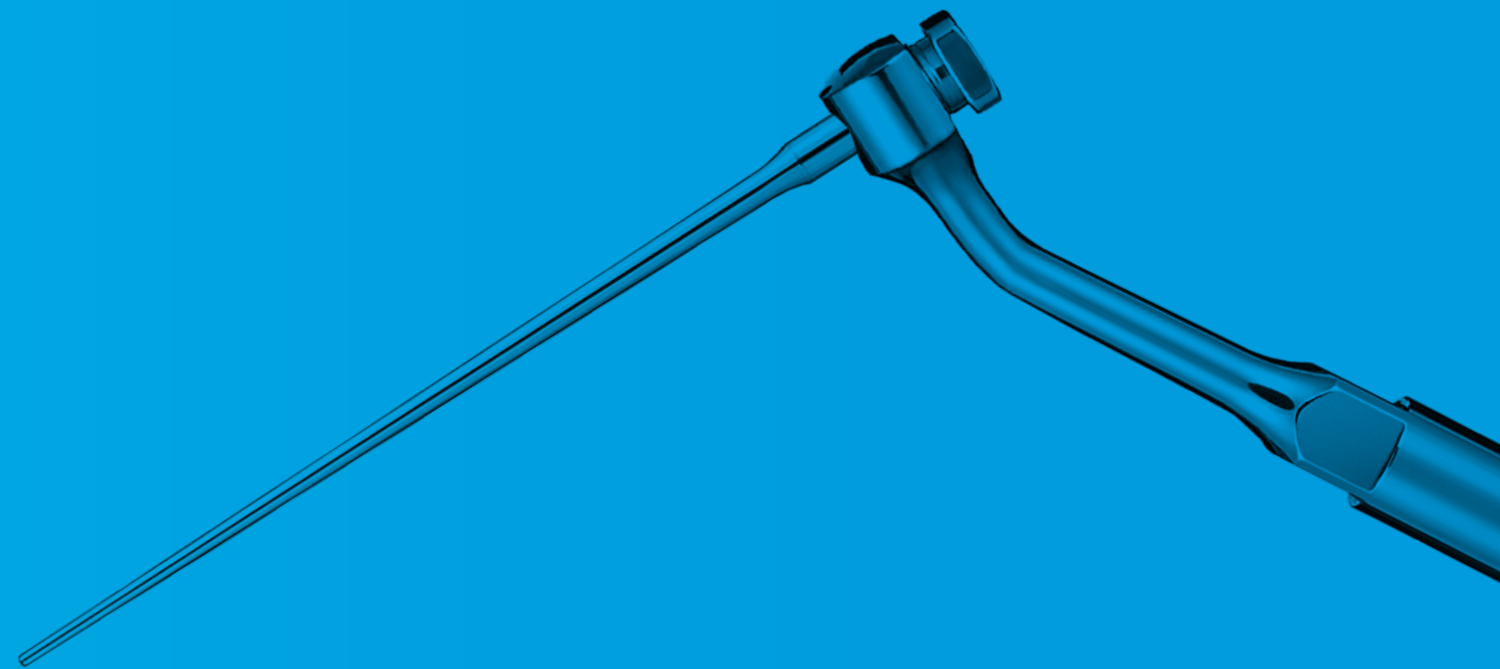

3つの特長

安全性


- 軟組織の損傷リスクが少ない
- 出血のリスクが少ない

経済性


- 先端部分のみを交換可能
- 低コスト

操作性

- ヘッドが小さく視野の確保が容易
- 臼歯部遠心面や頬側部へのアクセスが容易
- ホルダー 1 本で多目的な利用が可能

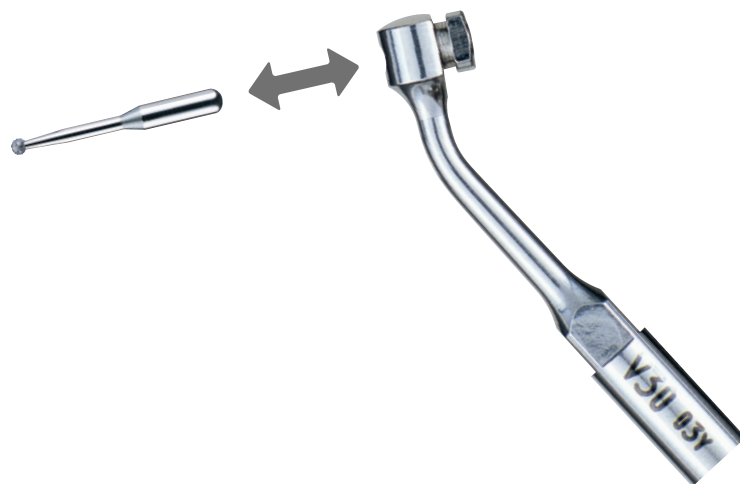

V-TIP System Line Up

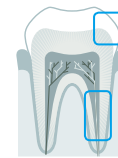

う蝕除去 P45~47

■う蝕除去用チップ




■形態修正・研磨用チップ




エンド P43~44

■根管洗浄用チップ

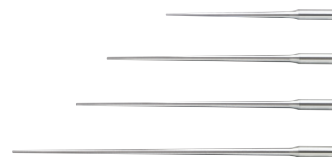

■根管拡大・形成用チップ

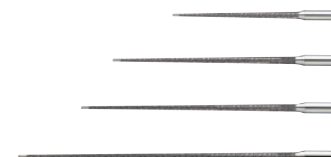

製品名 V30



標準価格 ¥12,000

製品番号 Z217030

・Vチップホルダー ・120° アングル ・Eチップ用レンチ付属
※先端チップ別売




V30


・120°アングル

V-TIP SYSTEM(Endodontics)




根管洗浄用

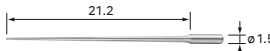
製品名	V-S50		製品番号	Y900169	• 根管洗浄用17mm • 3本入
標準価格	¥4,300				
製品名	V-S51		製品番号	Y900170	• 根管洗浄用23mm • 3本入
標準価格	¥4,300				
製品名	V-S52		製品番号	Y900171	• 根管洗浄用26mm • 3本入
標準価格	¥4,300				
製品名	V-S53		製品番号	Y900172	• 根管洗浄用32mm • 3本入
標準価格	¥4,300				

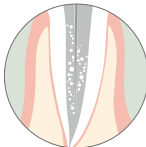



根管洗浄

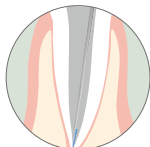

破折ファイル除去

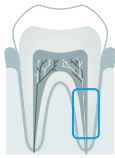

根管拡大・形成用

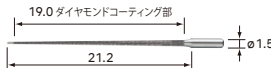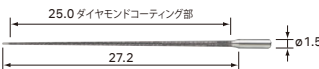製品名	V-S50D		製品番号	Y900173	• ダイヤモンドコーティング • 根管拡大、形成用17mm • 3本入
標準価格	¥6,300				
製品名	V-S51D		製品番号	Y900174	• ダイヤモンドコーティング • 根管拡大、形成用23mm • 3本入
標準価格	¥6,300				
製品名	V-S52D		製品番号	Y900175	• ダイヤモンドコーティング • 根管拡大、形成用26mm • 3本入
標準価格	¥6,300				
製品名	V-S53D		製品番号	Y900176	• ダイヤモンドコーティング • 根管拡大、形成用32mm • 3本入
標準価格	¥6,300				



※ステップを作りやすくするため、先端1mmの部分にダイヤモンドコーティングは施されておりません。

V-TIP SYSTEM(Restorative)



う蝕除去用


製品名	V-G70	
標準価格	¥3,700	製品番号 Y900118
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		
製品名	V-G71	
標準価格	¥3,700	製品番号 Y900119
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		
製品名	V-G72	
標準価格	¥3,700	製品番号 Y900120
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



歯頭部う蝕除去



根面う蝕除去

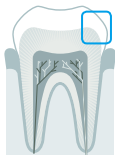

う蝕除去用

製品名	V-G75	
標準価格	¥3,700	製品番号 Y900121
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		
製品名	V-G76	
標準価格	¥3,700	製品番号 Y900122
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		




コンタクト直下のう蝕除去



根面う蝕除去

V-TIP SYSTEM(Restorative)

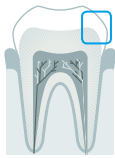

形態修正・研磨用

製品名	V-G77	レギュラー
標準価格	¥4,300	製品番号 Y900165
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		
製品名	V-G78	ファイン
標準価格	¥4,300	製品番号 Y900166
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		
製品名	V-G79	スーパーファイン
標準価格	¥4,300	製品番号 Y900167
• ダイヤモンドコーティング • 3本入		



う窩の開弧

POWER GUIDE

製品名	Varios2	Varios
SCALING		
G1	G 7	G 3
G2	G 7	G Max
G3	G 7	G 3
G4	G 5	G 3
G5	G 6	G 3
G6	G 8	G 1
G8	G 7	G 3
G9	G 5	G 1
G11	G 6	G 3
G12	G 7	G 3
G13	G 6	G 3
G16	G 8	-
PERIO		
P1	P 6	P 2
P1D	P 10	P 2
P2D	P 8	P 4
P3D	P 8	P 4



製品名	Varios2	Varios
P10	P 10	P Max
P11R	P 10	P Max
P11L	P 10	P Max
P20	P 8	P 4
P21R	P 8	P 4
P21L	P 8	P 4
P25R	P 10	P 4
P25L	P 10	P 4
P26R	P 6	P 3
P26L	P 6	P 3
P40	P 3	P 1
P41	P 3	P 1
V-P10	P 6	P 3
V-P11R	P 6	P 3
V-P11L	P 6	P 3
V-P12	P 6	P 3
V-P26R	P 6	P 3
V-P26L	P 6	P 3

製品名	Varios2	Varios
ENDODONTICS		
E4	E 6	E 3
E4D	E 7	E 3
E5	E 10	E 3
E6	E 10	E 4
E7	E 6	E Max
E7D	E 6	E Max
E8	E 2	E 4
E8D	E 2	E 4
E15D	E 6	E 3
E11	E 4	E 3
E12	E 3	E 3
E30RD	E 6	E 3
E30LD	E 6	E 3
E31D	E 6	E 3
E32D	E 6	E 3
EXTRACTION		
G95	G 10	-

製品名	Varios2	Varios
RESTORATIVE		
G61D	G 2	G 2
G62D	G 2	G 3
V-TIP(ENDODONTICS)		
V-S50	E 5	E 3
V-S50D	E 5	E 3
V-S51	E 3	E 1
V-S51D	E 3	E 1
V-S52	E 5	E 2
V-S52D	E 5	E 2
V-S53	E 5	E 2
V-S53D	E 5	E 2
V-TIP(RESTORATIVE)		
V-G70	G 6	G 3
V-G71	G 6	G 3
V-G72	G 6	G 3
V-G75	G 6	G 1
V-G76	G 6	G 3

製品名	Varios2	Varios
V-G77	G 6	G 3
V-G78	G 6	G 3
V-G79	G 6	G 3
このパワーガイドの記号と数値は、各チップにおける使用最大モードとパワー数値を示しています。 チップは必ず指定されたパワーの範囲でご使用ください。		

パワーモード比較表
各モードのパワーレベルについては、お手持ちのハンドピースのロゴをご確認ください。

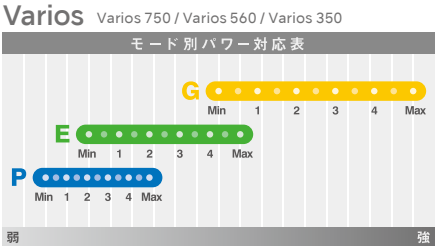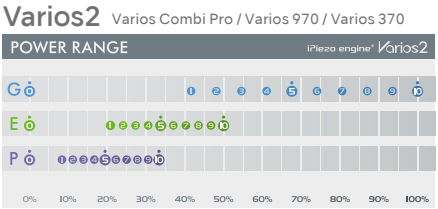

- 【チップの使用に際しての注意】
- 必ず添付文書および取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
 - チップのパワー設定は目的や症例に合わせて、各チップに適したモードとパワー数値でご使用ください。
 - 各モードのパワーレベルについてはパワーモード比較表をご覧ください。
 - 口腔内の状態や症例、歯石の沈着量を確認しながら低いモードとパワー数値から使用し、状態に応じてモードとパワー数値を上げて行くことをお勧めいたします。
 - チップは振動により発熱しますので、目的や症例によっては十分な注水下でご使用ください。
- ※指定されたパワーの範囲で使用した場合でも、使い方によっては破折することがあります。

バリオスチップカード — チップの磨耗度確認と交換時期の目安 —


一般的に超音波スケーラーチップは、ご使用頻度により先端部に磨耗が生じます。先端部が磨耗することにより振動状態が変わり歯石除去効率が下がります。磨耗の状態については専用のチップカードにてご確認ください。

使用方法

1. チップカードの切り込み部にチップをあわせませす。
2. チップの先端の磨耗度を測ります。
3. チップカードの裏面の図にそって磨耗度を確認してください。

※詳しくは下記の図をご参照ください。

適切な振動で効率よく、安全に使用するために、
「黄色線：1mm磨耗した状態」まで磨耗が確認されたらチップを交換することをお勧めします。

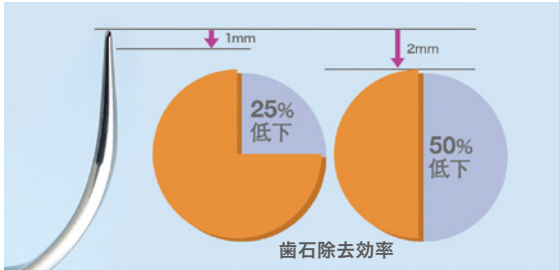

< 磨耗度 >


緑色線：磨耗していない状態

そのままご使用いただけます




黄色線：1mm磨耗した状態

交換することをお勧めします

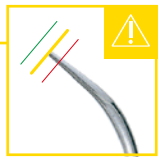

赤色線：2mm磨耗した状態

チップを交換してください

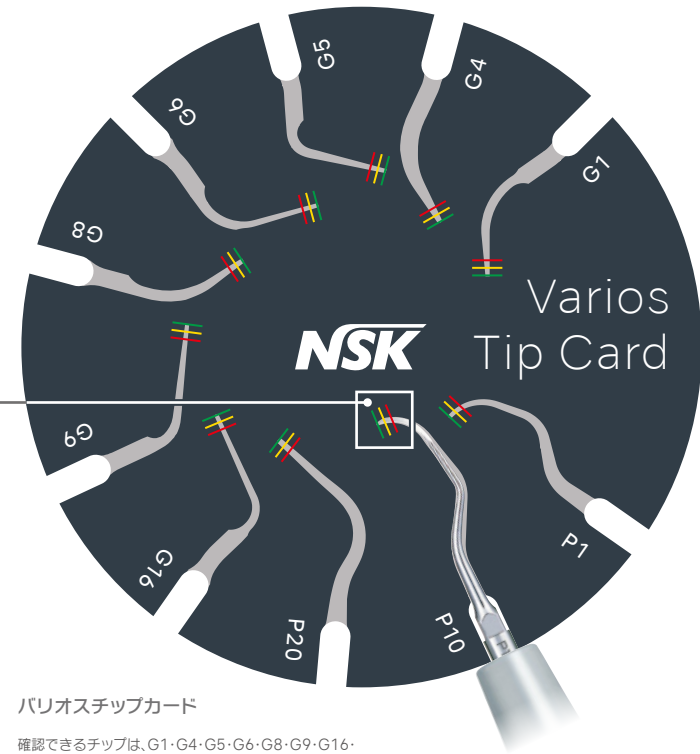

バリオスチップカード

確認できるチップは、G1・G4・G5・G6・G8・G9・G16・P1・P10・P20です。

チップ交換レンチ

G1～G62D・G95に含まれるチップ、P1～P41に含まれるチップ及びE15D、E30RD、E30LD、E31D、E32D、Vチップシステム先端部のチップにご使用ください。

※使用時は「カチツ、カチツ」と音がするまで締め付けてください。



Eチップ用レンチ

E4、E4D、E5、E6、E7、E7D、E8、E8D、E11、E12及びV10・V30(Vチップシステムホルダー)のチップにご使用ください。



チップ臨床動画

一部のチップについて、口腔内での使用例をCGと臨床動画でご紹介しております。以下のQRコードよりご覧ください。

G4SCALING



G6SCALING



G8SCALING



V-P10PERIO




V-P11R/V-P11LPERIO



P40PERIO



G9SCALING

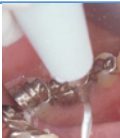

G16SCALING



G95EXTRACTION



P1PERIO



P1DPERIO



P2D/P3DPERIO



P10PERIO



P20PERIO



P25R/P25LPERIO



Varios Combi Proの
詳細は、ウェブサイト
をご覧ください。



Varios Seriesの
詳細は、ウェブサイト
をご覧ください。



超音波スケーラー等の
セミナー詳細は、
ウェブサイトをご覧ください。



株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700

TEL: 0289-64-3380
FAX: 0289-62-5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野4-8-1
TIXTOWER UENO 9F

TEL: 03-5828-4180
FAX: 03-5828-0064

大阪事務所 〒530-0057
大阪市北区曽根崎2-12-7
清和梅田ビル 10F

TEL: 06-6315-7217
FAX: 06-6315-7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール

受付時間 (土日祝日を除く) 9:00~17:00  0120-7242-56

NSK製品に関するご意見・ご質問など、お気軽にお寄せください。

