

STEP ①

ハンドピースからバーを取り外し、ユニットの各ジョイントに装着します。バー挿入部分をドア側に向けてドアを閉めます

エアタービン装着用
各社仕様アダプター



注1: ストレートハンドピースの場合は、必ず付属のテストバーを取りつけ、チャック開閉リングをロックしてからジョイントに接続して下さい。

注2: インプラント用またはサージカルハンドピース、エアースケラー、およびパテラスエアーマータは各製品の取扱説明書に従って注油を行って下さい。

STEP ②

ハンドピースを装着したジョイントのジョイント選択ボタンを押して、ジョイントLEDを点灯させます。

エアの噴き出し時間を選択するため、エア選択ボタンを押してS、M、Lからモードを選択します。



選択モード	ジョイント	注油時間/本	適正ハンドピース
Sモード (短)	タービン	28秒	エアタービン(M4/B2タイプのみ)
	Eタイプ	50秒	コントラアングルハンドピース ストレートハンドピース
Mモード (中)	タービン	30秒	エアタービン(M4/B2タイプ以外)
	Eタイプ	64秒	コントラアングルハンドピース ストレートハンドピース
Lモード (長)	タービン	33秒	エアースケラー S970 シリーズ
	Eタイプ	84秒	Mモードでは十分にオイルを排出できない ハンドピース

STEP ③

スタートボタンを押して、注油を開始させます。注油中は、ジョイントLEDが点滅します。



注油が終了すると、「ピー」という通知音が鳴り、ジョイントLEDが消灯します。

注1: ジョイントLED が消灯しているジョイントは、注油を行いません。

注2: ティーマックス S970シリーズは注油後ハンドピース内部の余分なオイルを排出するため、ハンドピース後部(ハンドピースとカップリングまたはホースの接続部)からオイルが出なくなるまで空運転させてください。

■エアタービン、コントラアングルハンドピースのチャック内の清掃を行うことができます

- ①チャック清掃用ノズルをジョイント "4" にロックするまで挿し込みます
- ②チャック清掃ボタンを押して、チャック清掃LEDを点灯させます
- ③ハンドピースのバー取り付け穴をチャック清掃用ノズルの先端に合わせ、手で保持します
- ④スタートボタンを押すと、清掃を開始します。清掃中はチャック清掃LEDが点滅します
- ⑤清掃が終了すると「ピー」という通知音が鳴り、チャック清掃LEDが消灯します

■ストレートハンドピースは、チャック内の清掃を行わないでください。故障する恐れがあります。

チャック内の清掃は、
ジョイント "4" のみ使用できます



チャック清掃用
ノズル

[製品名:チャック清掃用ノズル]
[製品番号:Z257301]

