



## 操作パネル

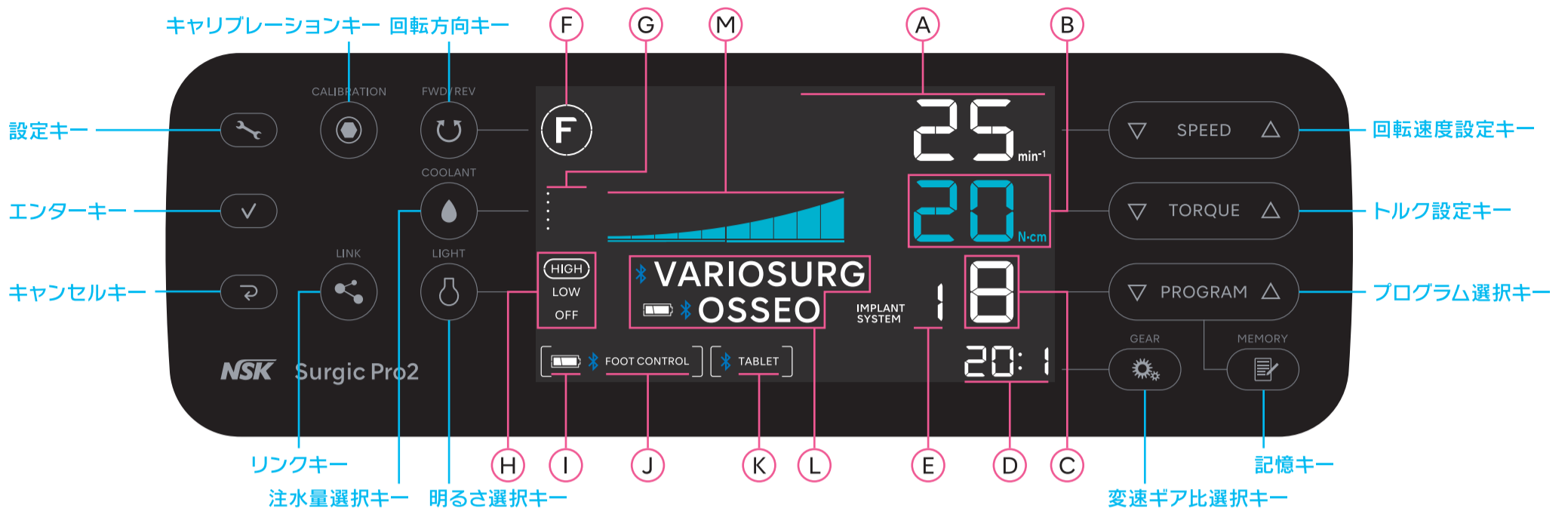


## フットコントロール

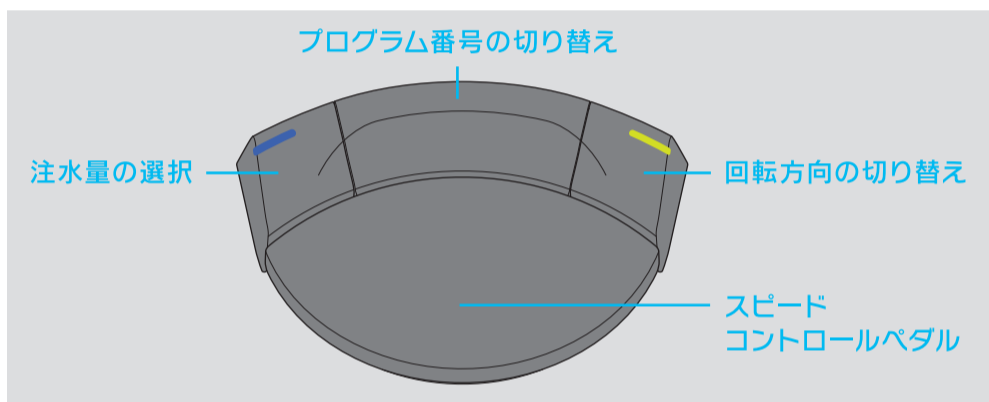

A	回転速度	H	ライトの明るさ
B	トルク上限値	I	フットコントロールの電池残量
C	プログラム番号	J	フットコントロールの接続状態
D	変速ギア比	K	外部端末との接続状態
E	インプラントシステム	L	VarioSurg 3, Osseo 100+との接続状態
F	回転方向	M	出力されているトルク
G	注水量		

## 使用前の準備

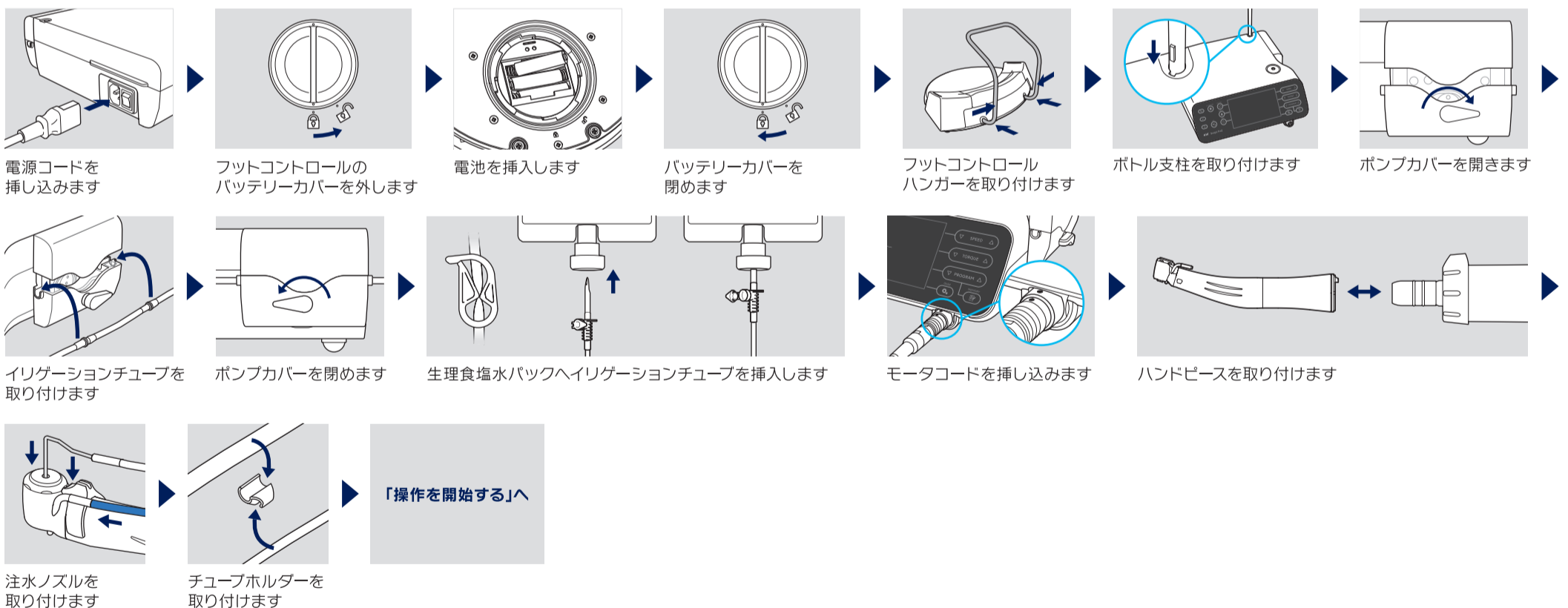


## 操作を開始する




# 初めて使用するとき(機器のペアリング)

**①**




2秒以上

**②**




**③**

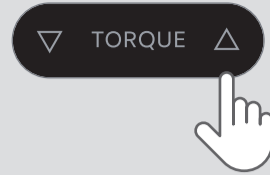

設定キーを長押し「BLE SET」が表示されます

エンターキーを押します

トルク設定キーで接続する機器を選択します  
お知らせ:「BLE SET」と「PAIRING」以外の表示は点滅します



**フットコントロール**

PAIRING FC

**Osseo 100+**





PAIRING OS

**VarioSurg3**

PAIRING LK


**外部端末**

PAIRING PC

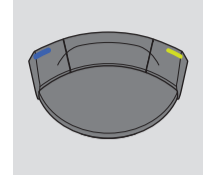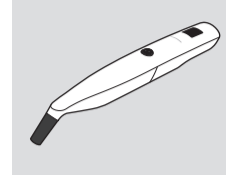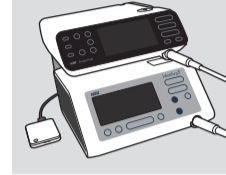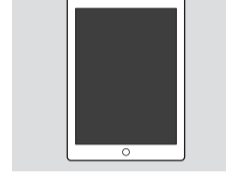エンターキーを押します


## ▼ フットコントロール

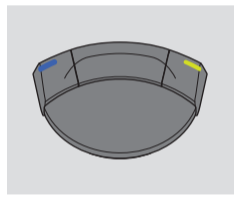


本製品とフットコントロールはあらかじめペアリングされているため、購入後すぐに使用することができます

フットコントロールのペアリングが解除された、または新しいフットコントロールを購入した際は以下の通りペアリングしてください


お知らせ: 電池を入れてから約10分間ペアリングが可能です




エンターキーを押します

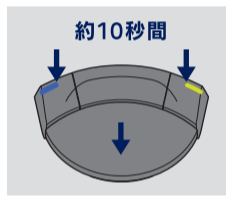

約10秒間  
2つのボタンとペダルを同時に押し続けます

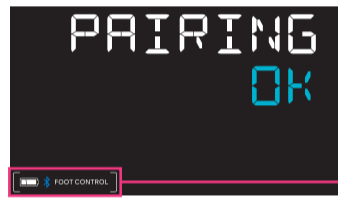

通知音が鳴り、液晶表示部に「OK」と表示されると、ペアリングが完了です  
フットコントロールと接続されていることを確認します

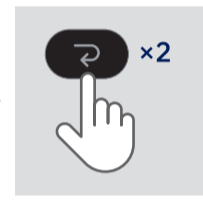

キャンセルキーを2回押して、通常画面に戻ります

## ▼ Osseo 100+





電源ボタンを押して、Osseo 100+の電源を入れます



電源ボタンを長押しします



「PA」が表示されます



通知音が鳴り、液晶表示部に「OK」と表示されると、ペアリングが完了です  
Osseo 100+と接続されていることを確認します



キャンセルキーを2回押して、通常画面に戻ります

## ▼ VarioSurg3





VarioSurg 3の電源を入れます



リンクモジュールのボタンを長押しします



リンクモジュールのLEDランプが青色になったら、ボタンを離します



通知音が鳴り、液晶表示部に「OK」と表示されると、ペアリングが完了です  
リンクモジュールと接続されていることを確認します



キャンセルキーを2回押して、通常画面に戻ります

あらかじめリンクモジュールをVarioSurg 3に接続してください



## ▼ 外部端末





アプリを起動します  
アプリは以下からダウンロードしてください



アイコンをタッチします



「Start」をタッチします



「123456」と入力し、「ペアリング」をタッチします



通知音が鳴り、液晶表示部に「OK」と表示されると、ペアリングが完了です  
外部端末と接続されていることを確認します



キャンセルキーを2回押して、通常画面に戻ります



[www.nsk-dental.com/qr/app-surgicpro2](http://www.nsk-dental.com/qr/app-surgicpro2)