



各部の名称

注水の設定

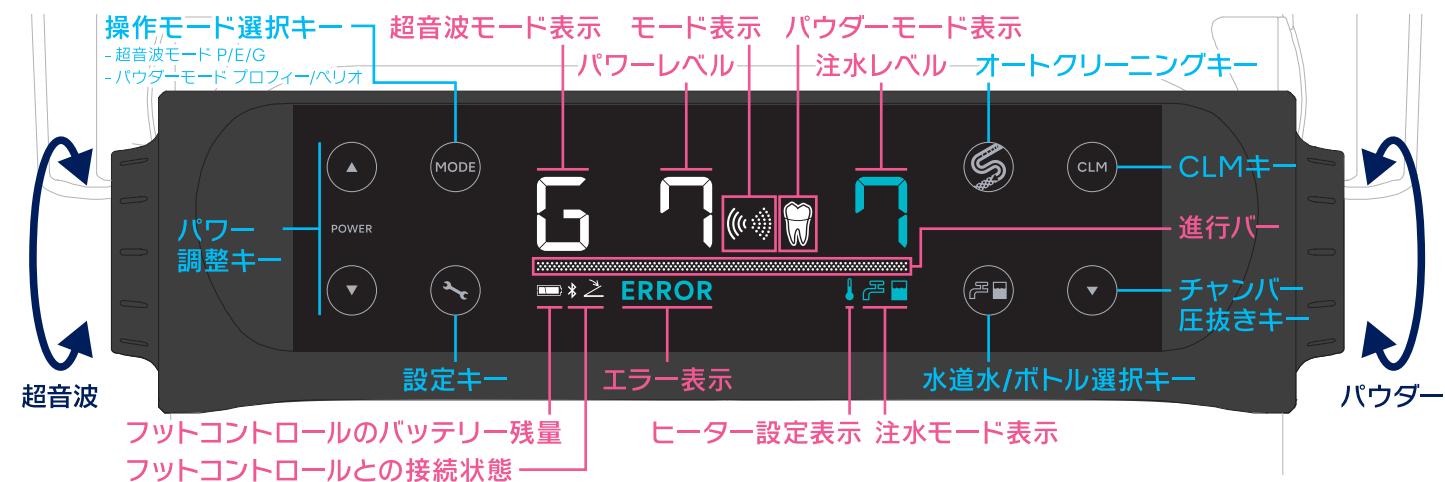


フットコントロール

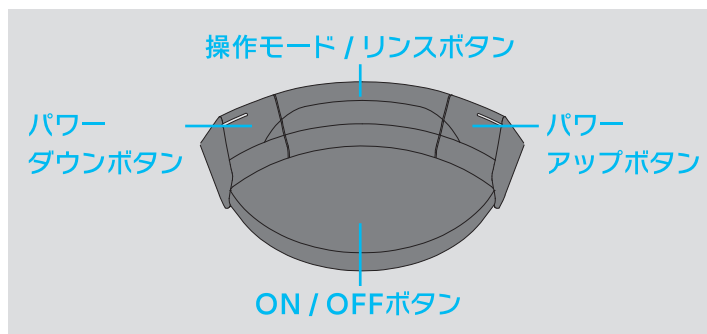


超音波モードの使用方法

- ① 超音波ハンドピースを持ちます。
- ② 超音波モードを選択します (P/EまたはG)。
- ③ パワーレベルを設定します。
- ④ 注水方法を選択します。
- ⑤ 注水レベルを調整します。
- ⑥ ON / OFF ボタンを押します。

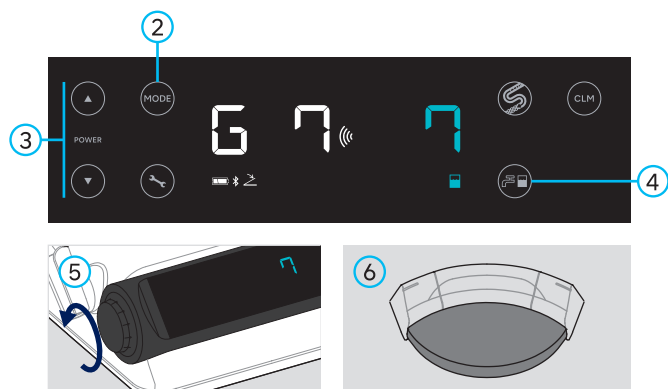


パウダーモードの使用方法

- ① パウダーハンドピースを持ちます。
- ② パウダーモードを選択します (プロフィーモード / バリオモード)。
- ③ パワーレベルを設定します。
- ④ 注水レベルを調整します。
- ⑤ ON / OFF ボタンを押します。

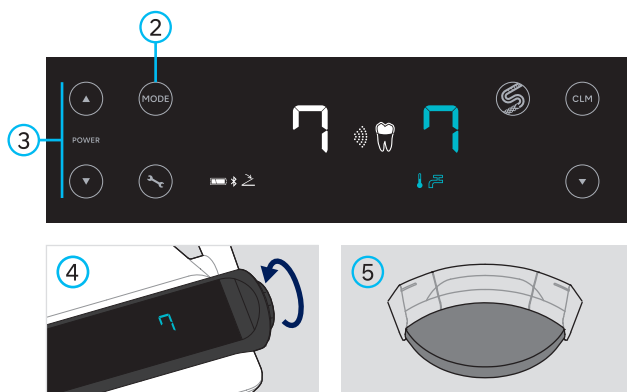


モード	チャンバー	ハンドピース	ノズル	使用	パウダー
			プロフィーノズル	10-60° 3-5mm	フラッシュパール
			バリオノズル	30-90° 3-10mm	ソフトパール
			バリオジェットノズル	30-90° 3-10mm	
			バリオノズル	30-90° 3-10mm	バリオメイト パウダー
			バリオノズル+ バリオメイトノズルチップ	30-90° 3-10mm	


パウダーの補充

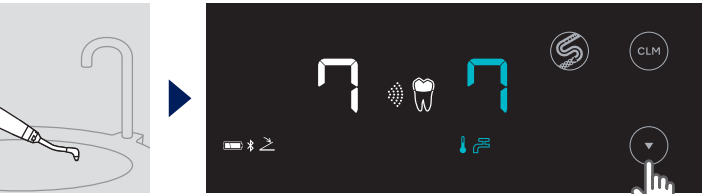


●を3秒間タッチすると「ピッ」と音が鳴り、
エア抜きを開始します。
エアが完全に抜けると自動的に停止します。

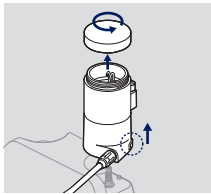

チャンバーとチャンバー
蓋を取り外します。

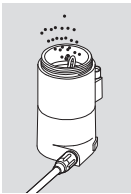

パウダーを
充填します。

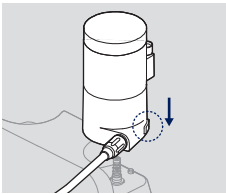


チャンバー蓋を締めて
チャンバーを取り付け
ます。

オートクリーニング


オートクリーニングモードの推奨頻度	バリオスコンビ Pro2の使用状況		
	超音波とパウダー	パウダーのみ	超音波のみ
毎治療後	W(パウダー)	W(パウダー)	—
1日1回(最終治療後)	D	P	W(超音波)

W (超音波): 残留水の除去
W (パウダー): 残留水と残留粉の除去
P: ハンドピースホースからの残留水の除去
パウダー回路からの残留粉の除去
チャンバー内からのエア抜き
D: ハンドピース コード/ホースからの残留水の除去
パウダー回路からの残留粉の除去
チャンバー内からのエア抜き

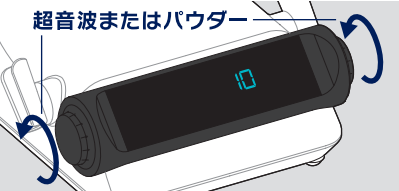

超音波またはパウダー


注水レベルを10に設定します。

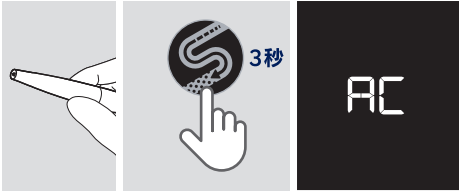

●をタッチします。「AC」が表示されます。




超音波 / パウダー
W
注水回路の洗浄

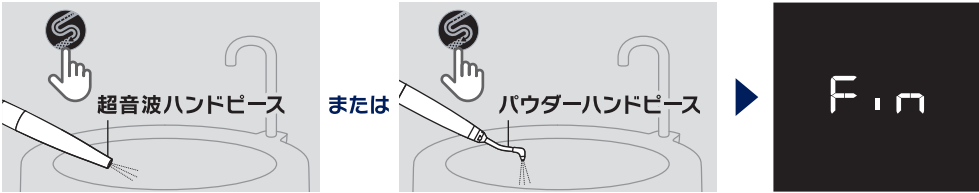

「W」を選択します。
コードまたはホース付きのハンドピースを手で持ちます。●をタッチします。
「Fin」が表示されたら●をタッチします。



パウダーのみ
P
注水回路とパウダーの水回路

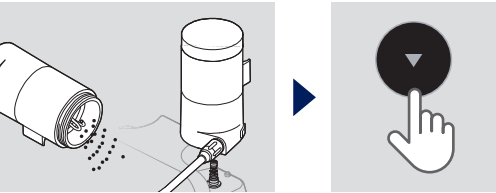

超音波とパウダー
D





パウダーを廃棄し、チャンバーを
取り付けます。
「D」または「P」を
選択します。
コードまたはホース付きのハンドピースを
手で持ちます。●をタッチします。





「Fin」が表示されたら●をタッチします。

フットコントロールのバッテリー残量と接続状態

治療の前後にフットコントロールの残量を確認してください。電池残量表示が点滅したらアルカリ単3形電池を交換してください。

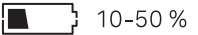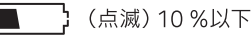 50-100 % 10-50 % (点滅) 10 %以下 0 %

フットコントロールとの接続状態を確認してください。

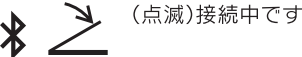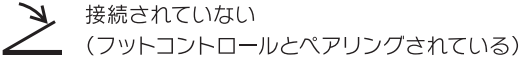 接続されています (点滅)接続中です 接続されていない
(フットコントロールとペアリングされている)

2025-07-30 CACEXXXX XXN