



各部の名称

注水の設定

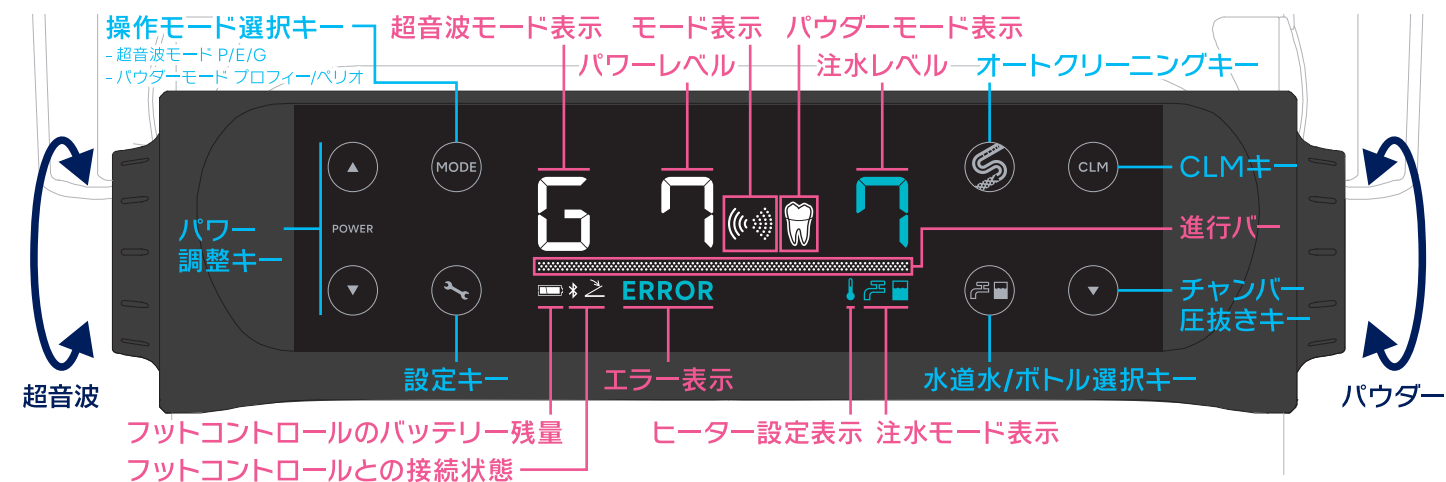


フットコントロール

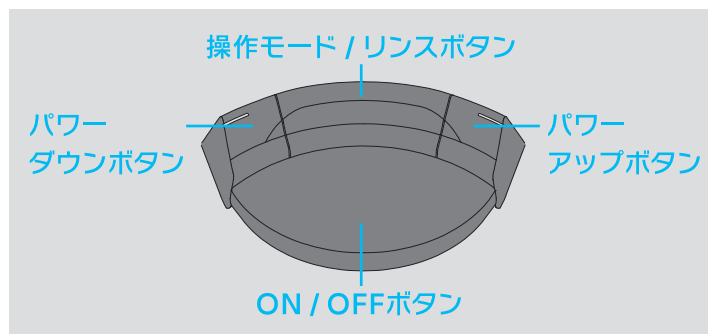


超音波モードの使用法

- ① 超音波ハンドピースを持ちます。
- ② 超音波モードを選択します (P/EまたはG)。
- ③ パワーレベルを設定します。
- ④ 注水方法を選択します。
- ⑤ 注水レベルを調整します。
- ⑥ ON / OFFボタンを押します。

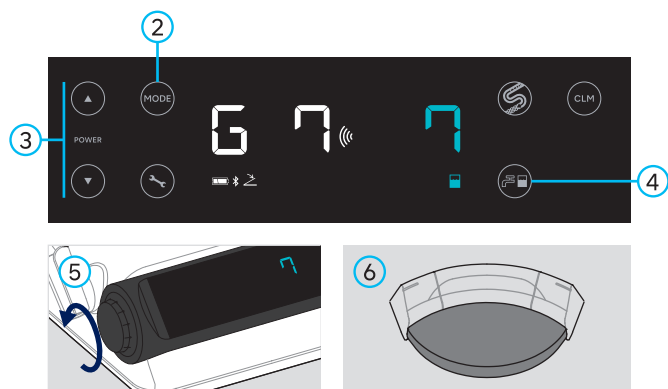



パウダーモードの使用法

- ① パウダーハンドピースを持ちます。
- ② パウダーモードを選択します (プロフィーモード / バリオモード)。
- ③ パワーレベルを設定します。
- ④ 注水レベルを調整します。
- ⑤ ON / OFFボタンを押します。


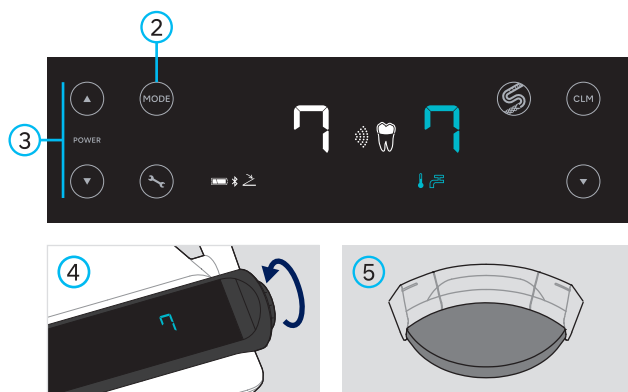


モード	チャンバー	ハンドピース	ノズル	使用	パウダー
			プロフィーノズル	10-60° 3-5mm	フラッシュパール
			バリオノズル	30-90° 3-10mm	ソフトパール
			プロフィーノズル	30-90° 3-10mm	
			バリオノズル	30-90° 3-10mm	バリオメイトパウダー
			バリオノズル+バリオメイトノズルチップ	30-90° 3-10mm	

パウダーの補充

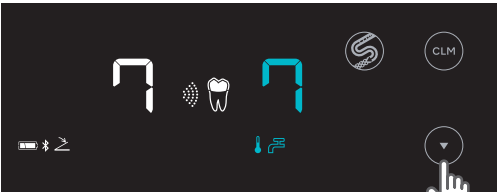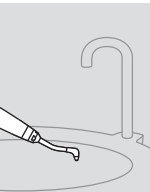

●を3秒間タッチすると「ピッ」と音が鳴り、
エア抜きを開始します。
エアが完全に抜けると自動的に停止します。

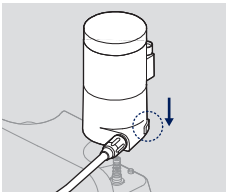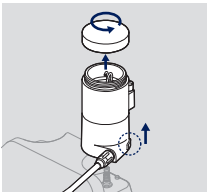

チャンバーとチャンバー
蓋を取り外します。


パウダーを
充填します。

チャンバー蓋を締めて
チャンバーを取り付け
ます。

オートクリーニング


オートクリーニングモードの推奨頻度	バリオスコンビ Pro2の使用状況		
	超音波とパウダー	パウダーのみ	超音波のみ
毎治療後	W(パウダー)	W(パウダー)	—
1日1回(最終治療後)	D	P	W(超音波)

- W (超音波): 残留水の除去
W (パウダー): 残留水と残留粉の除去
P: ハンドピースホースからの残留水の除去
パウダー回路からの残留粉の除去
チャンバー内からのエア抜き
D: ハンドピース コード/ホースからの残留水の除去
パウダー回路からの残留粉の除去
チャンバー内からのエア抜き

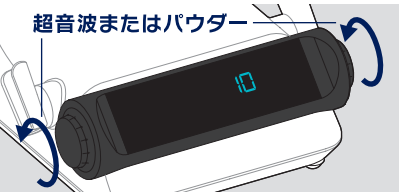

超音波またはパウダー

注水レベルを10に設定します。

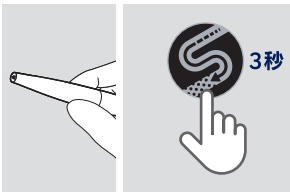

3秒

●をタッチします。「AC」が表示されます。



AC

超音波 / パウダー

W

注水回路の洗浄



「W」を選択します。



超音波ハンドピース

コードまたはホース付きのハンドピースを手で持ちます。●をタッチします。

または



パウダーハンドピース

●をタッチします。



Fin

「Fin」が表示されたら●をタッチします。


パウダーのみ

P


注水回路とパウダーの水回路



「D」または「P」を選択します。

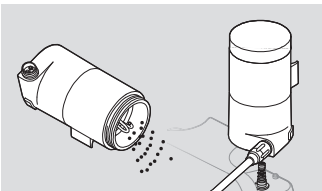

パウダーを廃棄し、チャンバーを取り付けます。

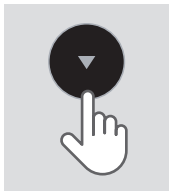

●をタッチします。



パウダーハンドピース
超音波ハンドピース

コードまたはホース付きのハンドピースを手で持ちます。●をタッチします。



Fin

「Fin」が表示されたら●をタッチします。

フットコントロールのバッテリー残量と接続状態

治療の前後にフットコントロールの残量を確認してください。電池残量表示が点滅したらアルカリ単3形電池を交換してください。



50-100 %



10-50 %



(点滅) 10 %以下



0 %


フットコントロールとの接続状態を確認してください。



接続されています



(点滅)接続中です

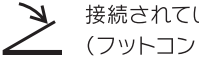

接続されていない
(フットコントロールとペアリングされている)