

チップは必ず下記に記載されている設定上限値以下で使用してください。

設定上限値をこえて使用すると、チップが折れたり、歯面を傷つけるなどの恐れがあります。

製品名	モード	設定上限値
SG1	S	80%
SG1A	S	80%
H-SG1	S	150%
SG2R	S	80%
SG2L	S	80%
SG3	S	80%
SG4	S	80%
SG5	S	80%
SG6D	S	80%
SG7D	S	50%
SG8	S	80%
SG8A	S	80%
H-SG8	S	150%
H-SG8R	S	150%
H-SG8L	S	150%
SG9	S	50%
SG10	S	50%
SG11	S	50%
SG12	S	100%
SG14R	S	80%
SG14L	S	80%
SG17	S	80%
SG18R	S	50%
SG18L	S	50%

製品名	モード	設定上限値
SG19	S	80%
SG30	S	50%
SG58	S	80%
SG68	S	80%
SG15A	S	50%
SG15B	S	50%
SG15C	S	50%
SG15D	S	50%
SG16A	S	50%
SG16B	S	50%
M-RE2	S	80%
M-ST1	S	80%
M-OC1R	S	80%
M-OC1L	S	80%
SCL1	S	50%
SCL11D	S	80%
SCL12D	S	80%
SCL3	S	50%
SCL13D	S	80%
SCL14D	S	80%
SCL5	S	50%
SCL15D	S	80%
E30RD-S	E	50%
E30LD-S	E	50%

製品名	モード	設定上限値
E31D-S	E	50%
E32D-S	E	50%
G1-S	S	50%
P20-S	P	100%
P25R-S	P	100%
P25L-S	P	100%
V10-S	-	-
V-P10-S	P	100%
V-P11R-S	P	100%*
V-P11L-S	P	100%*
V-P12-S	P	100%*

* 警告: バリオサージ 3およびバリオサージ 4でのみ使用可能