



操作パネル

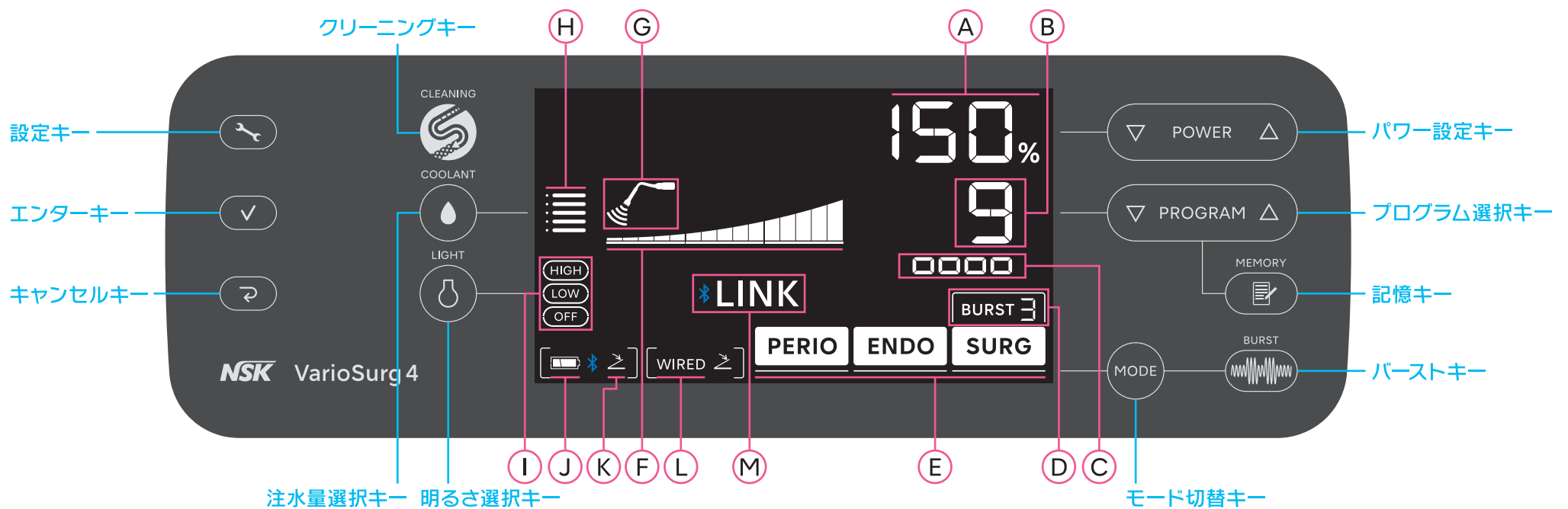


フットコントロール

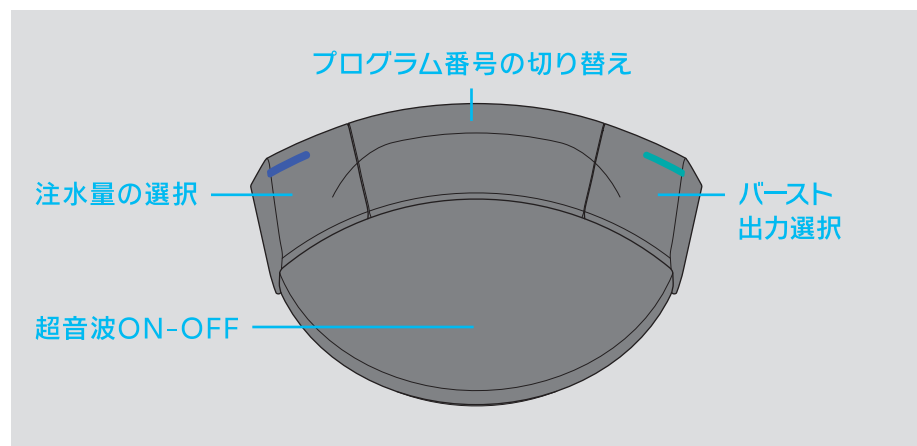

A	出力レベル	G	振動状態
B	プログラム番号	H	注水量
C	ワイヤレスフットコントロールの キャリブレーション成功状態	I	ライトの明るさ
D	バースト出力レベル	J	ワイヤレスフットコントロールの電池残量
E	モード	K	ワイヤレスフットコントロールとの接続状態
F	出力バーグラフ	L	ワイヤードフットコントロールとの接続状態
		M	サージック Pro2との接続状態

使用前の準備

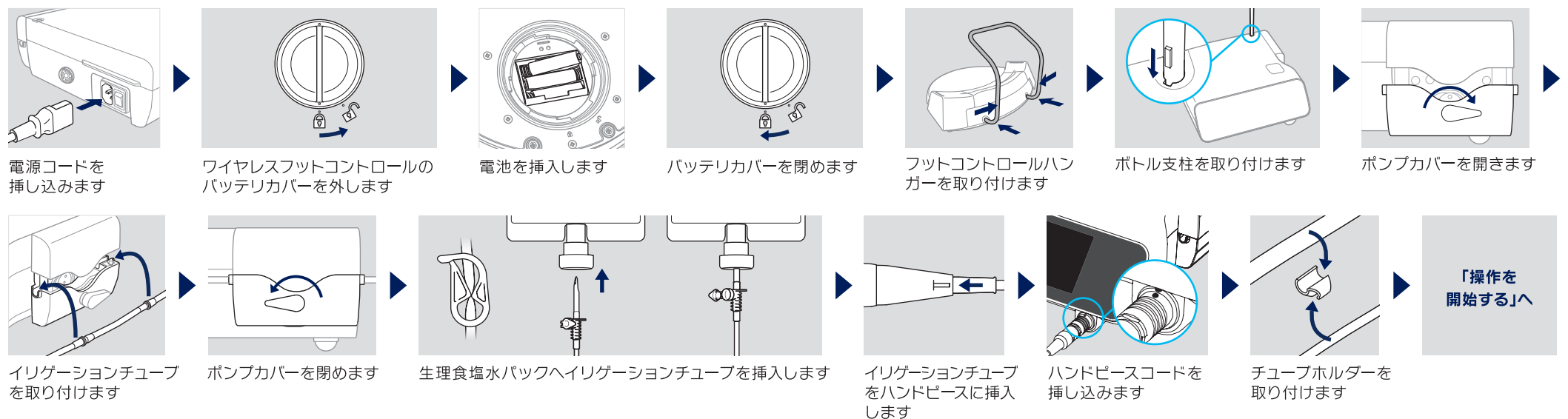

フットコントロールの接続

ワイヤレスフットコントロール (オプション)




通知音が鳴り、本製品の表示部に「OK」と表示されると、ペアリングが完了します
[$\geq$]が表示され、ワイヤレスフットコントロールが接続されていることを確認します

キャンセルキーを2回押して、通常画面に戻ります

ワイヤードフットコントロール(オプション)

ワイヤードフットコントロールの操作方法はワイヤレスフットコントロールと同じです。
ワイヤードフットコントロールが接続されている場合は、ワイヤレスフットコントロールは作動しません。

操作を開始する

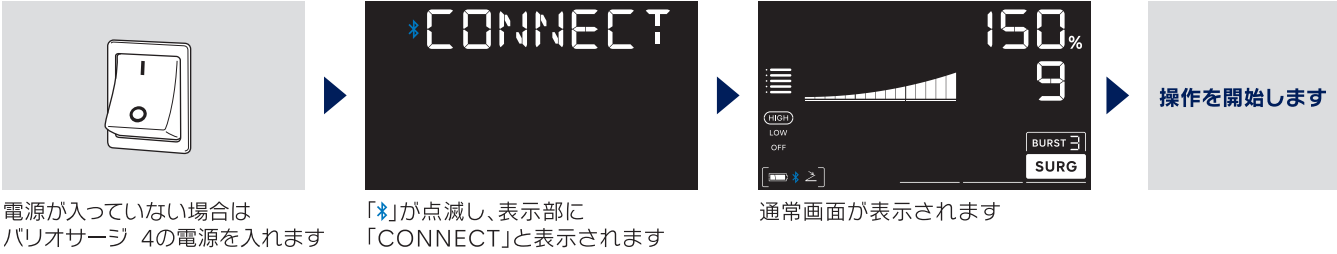

サージック Pro2とのリンク

Step 1. バリオサージ 4



Step 2. サージック Pro2




Step 3. バリオサージ 4 / サージック Pro2



2回目以降のサージック Pro2とのリンク

バリオサージ 4

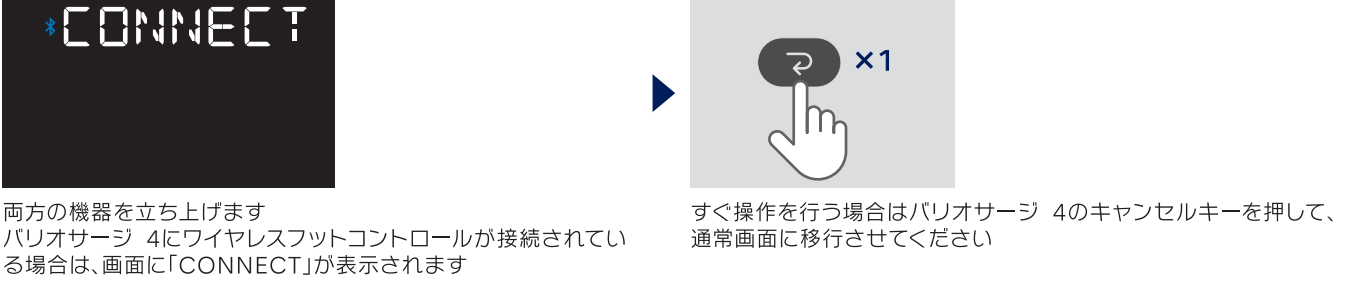

バリオサージチップ モードとパワーガイド

製品名	設定モード	設定上限値	製品名	設定モード	設定上限値	製品名	設定モード	設定上限値	製品名	設定モード	設定上限値	製品名	設定モード	設定上限値
SG1	S	80%	SG58	S	80%	SG5	S	80%	SCL11D	S	80%	SG18R	S	50%
SG2R	S	80%	H-SG1	S	150%	SG9	S	50%	SCL12D	S	80%	SG18L	S	50%
SG2L	S	80%	H-SG8	S	150%	SG10	S	50%	SCL3	S	50%	G1-S	S	50%
SG8	S	80%	SG68	S	80%	SG11	S	50%	SCL13D	S	80%	P20-S	P	100%
SG14R	S	80%	H-SG8R	S	150%	SG12	S	100%	SCL14D	S	80%	P25R-S	P	100%
SG14L	S	80%	H-SG8L	S	150%	SG15A	S	50%	SCL5	S	50%	P25L-S	P	100%
SG19	S	80%	M-RE2	S	80%	SG15B	S	50%	SCL15D	S	80%	V10-S	—	—
SG6D	S	80%	M-ST1	S	80%	SG16A	S	50%	E30RD-S	E	50%	V-P10-S	P	100%
SG7D	S	50%	M-OC1R	S	80%	SG16B	S	50%	E30LD-S	E	50%	V-P12-S	P	100%
SG1A	S	80%	M-OC1L	S	80%	SG15C	S	50%	E31D-S	E	50%	V-P11R-S	P	100%
SG8A	S	80%	SG3	S	80%	SG15D	S	50%	E32D-S	E	50%	V-P11L-S	P	100%
SG30	S	50%	SG4	S	80%	SCL1	S	50%	SG17	S	80%			