


⚠ 注意

内部ノズルやパウダーケースの清掃には、付属品以外のツールを使用しないでください。また、ホース接続部には、付属品の掃除用ワイヤー/ファイル、また付属品以外のツールを挿入しないでください（清掃できません）。


内部部品が破損し、パウダーがタービンホースへ逆流する恐れがあります。正しい使用方法以外でメンテナンスしたことによって機器が故障した場合、本製品は保証期間内でも有償の修理とさせていただきます。また、本製品に接続しているカップリング及び歯科用ユニット関連製品については、保証の対象外とさせていただきます。

■メンテナンス

付属品の掃除用
ワイヤー/ファイル

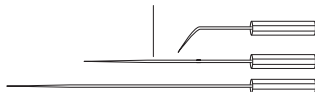


付属品以外のツール

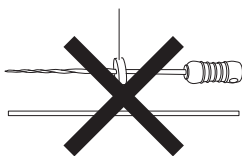

■ホース接続部、内部ノズルのメンテナンス

内部ノズル
(付属品の掃除用ファイルでのみ清掃可)

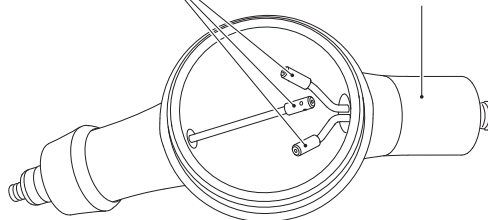


ホース接続部
(ワイヤーなど鋭利なものを挿入しての清掃不可)

付属品の掃除用
ワイヤー/ファイル



付属品以外のツール

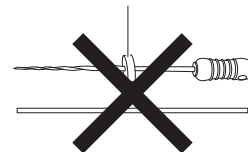

※メンテナンスの詳細については、各製品に添付されている取扱説明書をご参照ください。

ウェブサイトまたは二次元コードからもご確認ください。

www.japan.nsk-dental.com/support/maintenance/

