

1 使用目的

注油によるハンドピース内の余分なオイルをエアブローにより排出します。

2 安全上の注意


- ご使用前に必ずこの安全上の注意をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 危険事項の説明は、製品を安全にお使いいただき、使用者や他の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度ごとに分類しています。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守りください。

注意の区分	危害や損害の大きさと切迫の程度
▲ 注意	「軽度の人身障害または物的損害が発生する可能性がある注意事項」を説明しています。
お知らせ	「故障や性能低下を起さないためにお守り頂きたいこと、仕様や性能に関して知っておいて頂きたいこと」を説明しています。

▲ 注意

- 使用する前にこの取扱説明書を読み、各部の機能をよく理解してから使用を開始してください。
- 取扱説明書に記載されていない改造・分解をしないでください。
- 落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 使用中、少しでも異常を感じたら使用を中止して、販売店まで連絡してください。
- 本製品は、弊社製ハンドピースにのみ使用してください。

3 同梱物

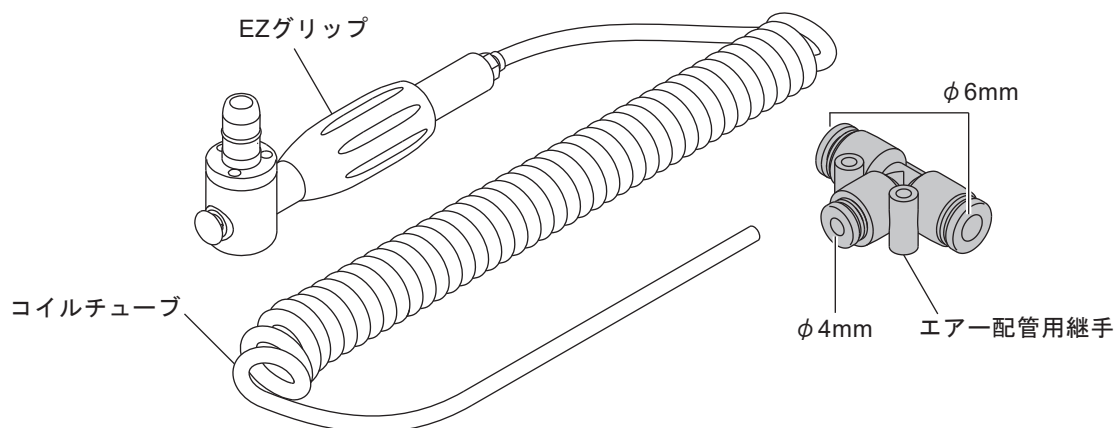

4 使用前の準備

EZグリップを使用する場所には、エアチューブ（外径φ6mm）のエア配管が必要です。


4-1 エアチューブの接続

お知らせ

- チューブの着脱方法を動画で紹介しています。アクセスできない場合は、株式会社 日本ピスコのホームページを確認してください。




- ① エア配管の元栓（元栓）を止めます。チューブ内の圧力がゼロになっていることを確認してください。
- ② EZグリップを設置するエアコンプレッサー等と他の機器等をつないでいるエアチューブをカットします。
- ③ エア配管用継手φ6mm2ヶ所に、カットしたエアチューブをそれぞれ奥まで挿し込みます。
- ④ エアチューブを押し引きしてエア配管用継手から抜けないことを確認します。

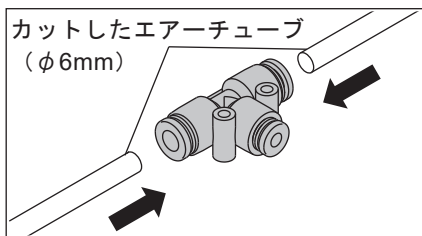

4-2 コイルチューブの接続

- ① エア配管用継手φ4mmに、コイルチューブ（外径φ4mm）を奥まで挿し込みます。
- ② コイルチューブを押し引きして、エア配管用継手から抜けないことを確認します。
- ③ エア配管の元栓を開けます。

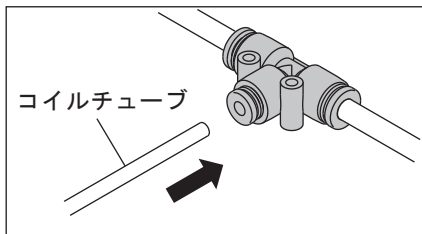



▲ 注意

- エア配管用継手は外径φ6mmエアチューブ用です。外径φ6mm以外のエアチューブを利用する場合は、外径に合った継手等を使用してください。
- 本製品の適正エア圧力は0.5~0.6MPa（5~6kgf/cm²）です。
- エアチューブがねじれたり、つぶれたりしないように注意してください。
- エアチューブの接続が困難な場合は、販売店まで連絡してください。
- エア元（エアコンプレッサー等）の水抜きを1週間に1度行ってください。
- 使用するエアはごみ、水、オイル等が混入しない清浄なエアを使用してください。


5 使用方法

ハンドピース注油後、以下の方法でハンドピース内の余分なオイルを排出してください。

- ① EZグリップのインサートをハンドピース後部へ挿し込みます。
- ③ 固定解除ボタンを押しながらハンドピースを引き抜きます。

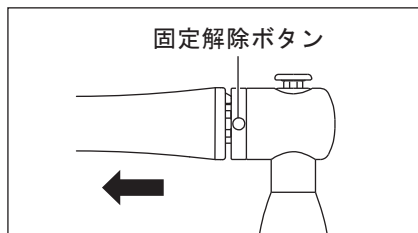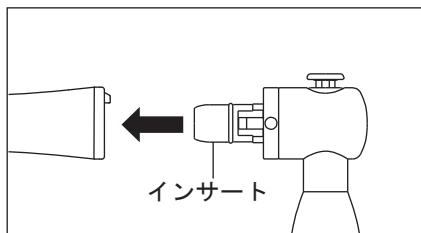

- ② エアブローボタンを10秒程度押してハンドピース内に残留したオイルを排出します。

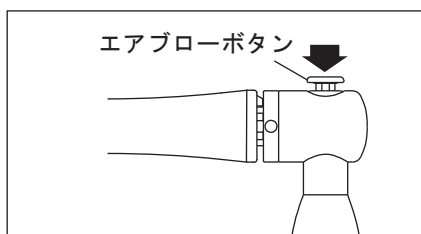

▲ 注意

- ハンドピース内の余分なオイルにより発熱する恐れがあるため、注油後はオイルを排出してください。
- ハンドピースをカチッというまで挿し込んだあと軽く引き、ハンドピースが抜けないことを確認してください。ハンドピースがエアの圧力で飛び出す恐れがあります。
- エアブロー中は固定解除ボタンを押さないでください。ハンドピースがエアの圧力で飛び出す恐れがあります。

お知らせ

- ハンドピースヘッドからのオイル飛散を防ぐため、スプレーミスト吸収パック (REF: Y900084)の使用をお勧めします。

6 保守

6-1 清掃

EZグリップに汚れが見られる場合は、水を含ませた布等で丁寧に拭き取ります。


▲ 注意

- 本製品は滅菌できません。

6-2 Oリングの交換

インサート部からエア漏れ等の症状が現れたら、Oリングを交換してください。

- ① 交換するOリングを指先でたるみをつけて取り外します。
- ② 新しいOリングを外したOリングがはまっていた溝にはめ込みます。
※交換用Oリングはスペアパーツを参照してください。

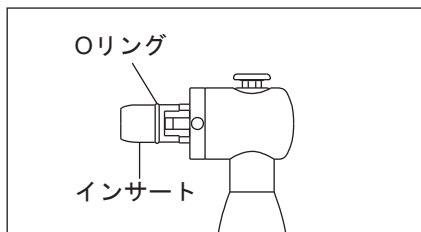

7 スペアパーツ

製品名	REF	備考
Oリング	D0312060100	—
EZスプレーグリップ	Z229011	—
コイルチューブ	Z229135	—
エア配管用継手	D2A100307	PEG6-4

8 製品廃棄

製品の廃棄が必要な場合は、自治体の指示に従って適切に廃棄してください。

9 仕様

9-1 仕様

型式	EZグリップ
REF	ZA02290100
適正エア圧	0.5~0.6MPa (5~6Kgf/cm ²)

9-2 シンボルマーク



注意
取扱説明書参照

SN シリアル番号

REF カタログ番号（製品番号）

株式会社ナカニシ
〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向 700
TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
www.nsk-nakanishi.co.jp

お客様相談窓口
☎0120-7242-56
9:00—17:00/土日・祝日を除く
cs@nsk-nakanishi.co.jp



ウェブサイトへ
アクセス