


各部の名称

操作パネル

液晶パネル

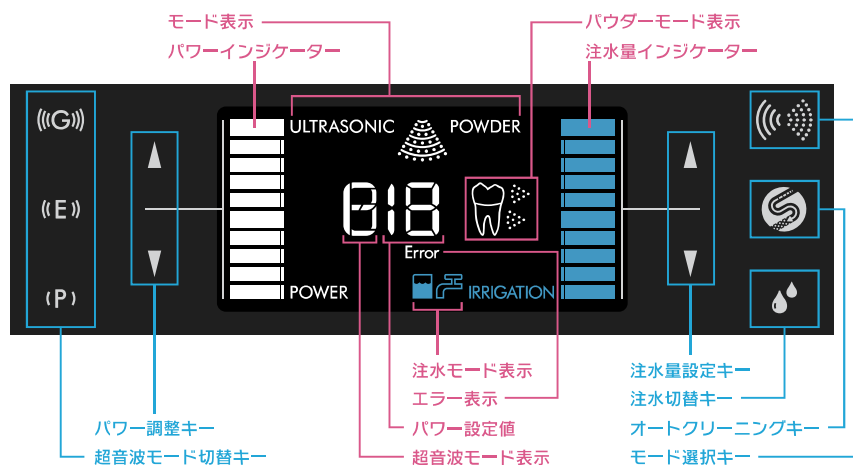

フットコントロール

超音波モード使用時

P/E/G切替

パワーダウン

振動+注水

パワーアップ

パウダーモード使用時

リンス(注水+エア)


パワーダウン

パウダー+注水+エア

パワーアップ

超音波モードの使用方法

ULTRASONIC

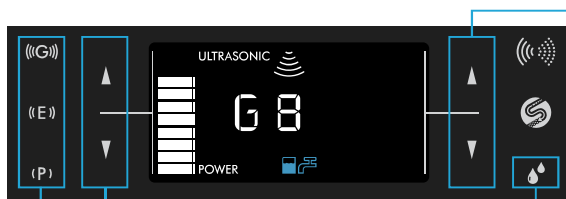


超音波モード切替キーを押して、使用するモードを選択してください。

パワー調整キー(▲▼)を押してパワーを設定してください。

注水切替キーを押して、注水方法を選択してください。(ボトル■、水道水■)

注水量設定キー(▲▼)を押して注水量を調整してください。

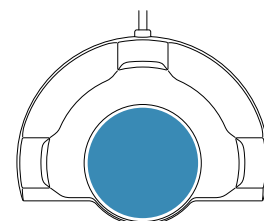

フットコントロールの●ボタンを押して作動させてください。

ハンドピース作動時の操作について

操作可能: パワー、注水量の調整

操作不可: 超音波モードや注水モードの変更、オートクリーニング



パウダーモードの使用方法

POWDER PROPHY

POWDER PERIO


モード	チャンバー	パウダー
プロフィーモード (緑上)	プロフィー用	フラッシュパル ソフトパル
ペリオモード (緑下)	ペリオ用	ペリオメイトパウダー

チャンバーにぴったり合うようにチャンバー用ふたをしっかりと閉め、コントロールユニットにまっすぐ挿し込みます。

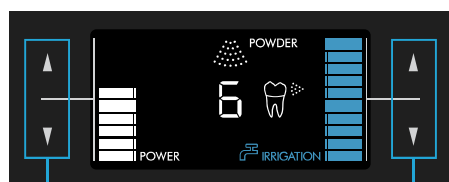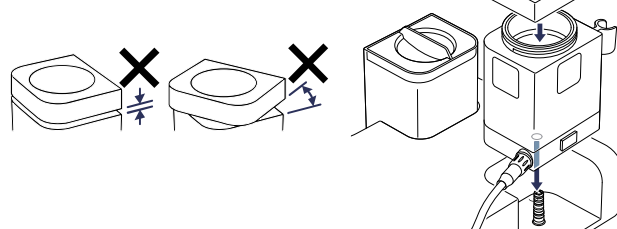

パワー調整キー(▲▼)を押して出力を設定してください。

注水量設定キー(▲▼)を押して注水量を調整してください。

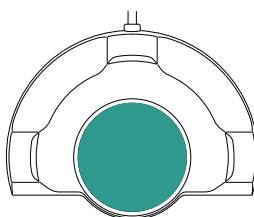

フットコントロールの●ボタンを踏むと、パウダーと水、エアが出ます。

ハンドピース作動時の操作について

操作可能: 出力、注水量の調整

操作不可: 注水モードの変更、オートクリーニング


エア抜き

パウダーの補充を行う場合、または、チャンバーを取り外す場合は、事前にチャンバー内のエア抜きを行ってください。

- ① オートクリーニングキーを約1秒間長押し、「ピッピッ」と鳴ったらエア抜きが始まります。
- ② チャンバー内のエアが全て排気されたら終了します。

治療後のメンテナンス

オートクリーニング(超音波ハンドピース)

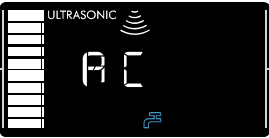

- ① ハンドピースからチップを取り外します。
- ② 注水ボトルを取り外し、ボトル内部を流水で洗浄します。
- ③ 注水ボトルに蒸留水、または精製水を半分以上入れます（生理食塩水不可）。
- ④ 注水ボトル接続部にボトルをまっすぐ挿し込みます。
- ⑤ 洗浄に使用した水を受ける容器に、ハンドピース先端を向けます。
- ⑥ オートクリーニングキーを約3秒間長押しして、オートクリーニングを始めます。クリーニング時間は約45秒です。



オートクリーニング(パウダーハンドピース)



- ① パウダーハンドピース（ペリオ用）の場合はノズルチップを取り外します。
- ② 洗浄に使用した水を受ける容器に、ハンドピース先端を向けます。
- ③ オートクリーニングキーを約3秒間長押ししてオートクリーニングを始めます。クリーニング時間は約45秒です。

チャンバーとホースの清掃

- ① オートクリーニングキーを約1秒間長押しし、エアー抜きを行います。
- ② ロックボタンを押しながらチャンバーを取り外し、まっすぐ引き上げます。
- ③ チャンバー用ふたを開け、残ったパウダーを取り除きます。
- ④ チャンバー用ふたをしっかりと閉め、コントロールユニットにまっすぐ挿し込みます。
- ⑤ パワー設定「10」、注水量設定「10」に設定し、フットコントロールのボタンを踏んで空運転(1秒間以上)を5回繰り返し行います。
- ⑥ オートクリーニングを行い、パウダーハンドピースおよびハンドピースホース内の残留粉および残留水を排出します。
- ⑦ オートクリーニングキーを約1秒間長押しし、エアー抜きを行います。
- ⑧ ロックボタンを押しながらチャンバーを取り外し、まっすぐ引き上げます。
- ⑨ ハンドピースホースコネクタのナットをゆるめ、チャンバーからハンドピースホースを取り外します。
- ⑩ チャンバー内に残ったパウダーをエアなどで取り除きます。
- ⑪ ハンドピースホースに付着したパウダー等の汚れを拭き取ります。
- ⑫ ハンドピースホース両側のコネクタやハンドピースホースソケットに付着したパウダーを付属の掃除用ブラシで取り除きます。

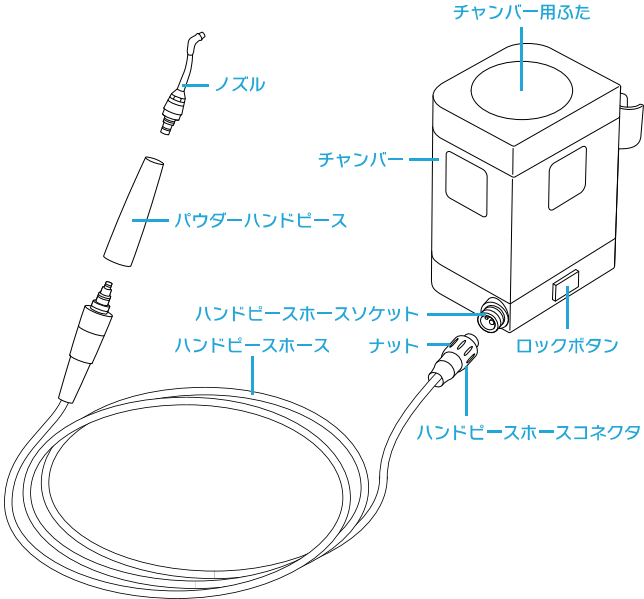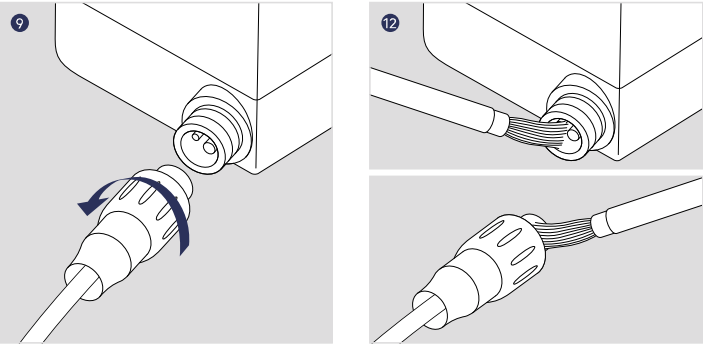

エラーコード

エラーコード	エラーの内容	対処
0	システムエラー	コントロールユニットの電源を入れ直し、解除されなければ、販売店まで連絡してください。
1	24V電圧異常	
2	12V電圧異常	
3	ポンプ電流異常	注水ポンプの接続を確認し、解除されなければ販売店まで連絡してください。
4	エア圧異常	入力空気を確認し、解除されなければ販売店まで連絡してください。
5	ヒータ電圧異常	コントロールユニットの電源を入れ直し、解除されなければ、販売店まで連絡してください。
6	ヒータ電流異常	
7	ヒータ温度異常	水の回路を確認し、コントロールユニットまで水を供給してください。コントロールユニットを一度冷ましてから、再度使用してください。解除されなければ、販売店まで連絡してください。
8	フットコントロール通信異常	フットコントロールの接続を確認し、解除されなければ販売店まで連絡してください。
9	超音波ハンドピース異常	ハンドピースの接続を確認し、解除されなければ販売店まで連絡してください。
12	タッチセンサ通信異常	電源を入れ直し、解除されなければ、販売店まで連絡してください。
13	超音波ユニットセルフチェックエラー	
14	超音波ユニットシステムエラー	