

吸引歯ブラシキット / 吸引歯ブラシ

取扱説明書

OM-Z0275 002

このたびは、吸引歯ブラシキット / 吸引歯ブラシをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品はビバエース ベーシックセット / ビバ Q に接続して使用する機器です。

ご使用前に使用上の注意、取扱方法、また保守点検などにつきましてこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法によりご愛用くださいますようお願い申し上げます。

また取扱説明書は、ご使用になる方がいつでも見られる場所に保管してください。

1 使用者・使用目的

使用者： 歯科医師、歯科衛生士

使用目的： 吸引を行いながら口腔ケアを行うことを目的とする。弊社製ビバエース ベーシックセット / ビバ Q に接続して使用します。

2 安全上の注意


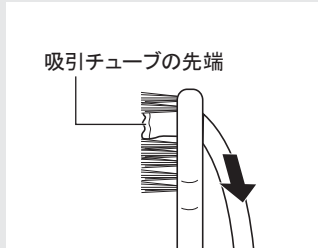
- ご使用前に必ずこの安全上の注意をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 危険事項の説明は、製品を安全にお使いいただき、使用者や他の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度ごとに分類しています。いずれも安全に関する内容ですから、必ずお守りください。

注意の区分	危害や損害の大きさと切迫の程度
⚠ 警告	重度の人身障害または物的損害が発生する可能性がある注意事項
⚠ 注意	軽度の人身障害または物的損害が発生する可能性がある注意事項

⚠ 警告


感染予防のため、本製品は患者毎に交換してください。

⚠ 注意


- ・ 嘔吐反応（嘔吐反射）の強い患者には、舌の後半部のブラッシングを控えてください。
 - ・ 吸引が強くと痛がる場合は、吸引チューブの先端を奥に引き込むか、吸引力を弱めてください。吸引チューブは引き過ぎると歯ブラシから抜けてしまいますので注意してください。
 - ・ 吸引チューブの先端が当たって痛がる場合は、吸引チューブの先端を奥に引き込んでください。吸引チューブは引き過ぎると歯ブラシから抜けてしまいますので注意してください。
 - ・ 吸引チューブの先端
- 
- 
- ・ 使用時は安全、健康のため保護眼鏡、マスク、グローブ等を着用してください。
 - ・ 注水する際は、水道水のみを使用してください。生理食塩水、薬液、酸化電位水（強酸性水、超酸性水）等を使用すると故障の原因になります。
 - ・ 食物残渣などはあらかじめ取り除いてください。吸引チューブが詰まる原因になります。
 - ・ ペースト状の歯磨剤は使用しないでください。吸引チューブが詰まる原因になります。
 - ・ 発泡剤含有の歯磨剤は使用しないでください。歯磨剤が泡立つとビバエース / ビバ Q のコントロールユニット内部に入り込み、故障の原因になります。
 - ・ 吸引歯ブラシ表面を消毒する際は、エタノール、またはイソプロパノールが添加されたエタノールを清掃用消毒液（以下清掃用消毒液）として使用してください。

3 同梱物一覧（吸引歯ブラシキット）

①

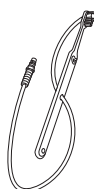

②

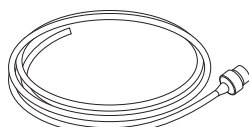


No.	部品名	数量
1	吸引歯ブラシ	10
2	吸引チューブ	10

<吸引歯ブラシ仕様>


柄の材質	ABS 樹脂
毛の材質	ナイロン
毛の硬さ	ふつう
耐熱温度	80°C

4 使用前の準備

1 吸引歯ブラシのチューブ端ノズルに吸引チューブを突き当たるまで挿し込みます。

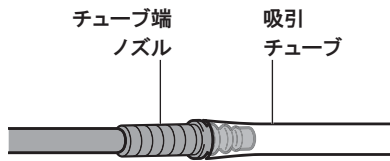

2 吸引チューブをバキュームボトルの蓋に奥まで挿し込みます。

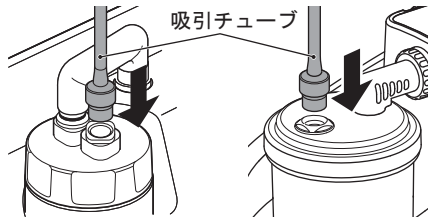

▲ 注意

- 使用前に、“6 治療後のメンテナンス”に従って、洗浄してから使用してください。
- 不完全な接続は、吸引力の低下および吸引物（唾液、血液等）が漏れる原因になります。

5 使用方法

- 1 誤嚥しないよう、患者の上部を斜め 30 度位に起こすか、座位の安定した姿勢を取ります。
- 2 コップに水道水を入れ、ブラシ部にその水を含ませ、唇や口の中を湿らせます。乾燥が強いようなら、これを繰り返します。
- 3 通常の歯ブラシと同様にブラッシングを行い、口腔内の唾液の溜まり具合を見ながらバキュームを作動させ吸引します。
バキュームを作動させる方法は、ピバエース ベーシックセット / ピバ Q の取扱説明書（“バキュームの使用”の項）に従ってください。

▲ 注意

吸引チューブが詰まって吸引が止まっていないか等、吸引の状態を確認しながら使用してください。

6 治療後のメンテナンス

▲ 注意

- 歯ブラシは 80℃以上の熱湯に入れるとブラシが開く恐れがありますので、煮沸しないでください。
- 酸化電位水（強酸性水、超酸性水）、強酸、強アルカリ性の薬剤、塩素含有の溶液、ベンジン、シンナー等の溶剤で洗浄、浸漬、拭き取りをしないでください。
- 滅菌および熱水洗浄器を使用した洗浄、消毒はできません。除菌および消毒については、以下に記載した方法に従ってください。

- 1 水道水を吸引させてチューブ内部を洗浄します。
- 2 バキュームボトルの蓋から吸引チューブを取り外します。
- 3 吸引チューブから吸引歯ブラシのチューブ端ノズルを取り外します。
- 4 吸引歯ブラシ、吸引チューブの外装を流水できれいに洗浄します。
- 5 水をよくしぼった布で拭いて、歯ブラシは乾燥させてから清潔な状態で保管します。

除菌する場合は、紫外線ランプを用いた歯ブラシ除菌器を使用してください。
消毒する場合は、清掃用消毒液を含ませた布等で拭いてください。

7 保守

<吸引歯ブラシの交換>

使用毎に歯ブラシの状態を確認し、歯ブラシの毛が開いてきたら、新しいものに交換してください。

8 スペアパーツ

製品名	製品番号	備考
吸引歯ブラシキット	U1144089	吸引歯ブラシと吸引チューブの 10 本セット
吸引歯ブラシ	U1144821	10 本セット

9 製品廃棄

一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。
不明な点は購入した販売店まで連絡してください。

