



ビバサポート2 操作パネル

1 接続図(裏面)のように、ビバサポート2と使用する製品を接続します。

2 ビバサポート2の充電状態を確認します。
 ※充電が不足している場合は、 が点灯します。電源コードをコンセントに押し込んで使用してください。
 AC-IN CHARGEランプが点灯します。

3 ビバサポート2の 電源キーを長押しして電源を入れます。

ビバメイトG5、パリオス370をお使いの場合

4 ビバメイトG5またはパリオス370の電源を入れます。

5 シンクロキーを押して、シンクロモードにしてください。
 動作中は、シンクロランプが点滅します。

6 注水量選択キーで注水量を適宜調整してください。

7 排唾機能を使用する際は、
 排唾ON/OFFキーを押してONにしてください。
 動作中は排唾ランプが点灯します。

8 フットコントロールを踏むとモータが作動し、注水を開始します。
 注水のON/OFFは、フットコントロールで操作します。
 注水のみを止めたい場合は、注水ON/OFFキーを操作してください。
 ※排唾機能は、排唾ON/OFFキーのみで動作します。
 フットコントロールでは作動しません。

その他の製品をお使いの場合


4 注水ON/OFFキーで注水を行います。
 動作中は注水ランプが点灯します。

5 注水量選択キーで注水量を適宜調整してください。


6 排唾機能を使用する際は、
 排唾ON/OFFキーを押してONにしてください。
 動作中は排唾ランプが点灯します。

ビバサポート2 接続ガイド


1 ビバメイトG5と接続する場合

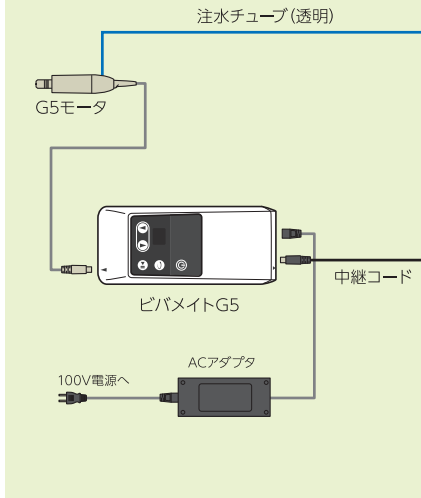


2 バリオス370と接続する場合

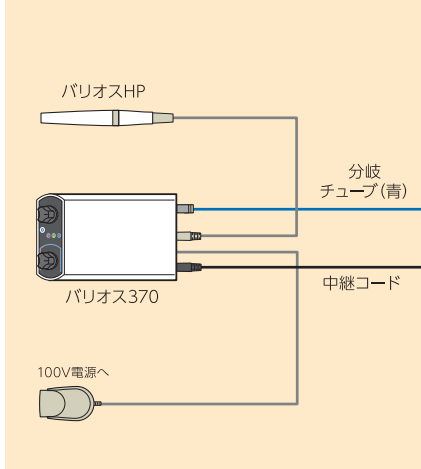

ビバサポート2

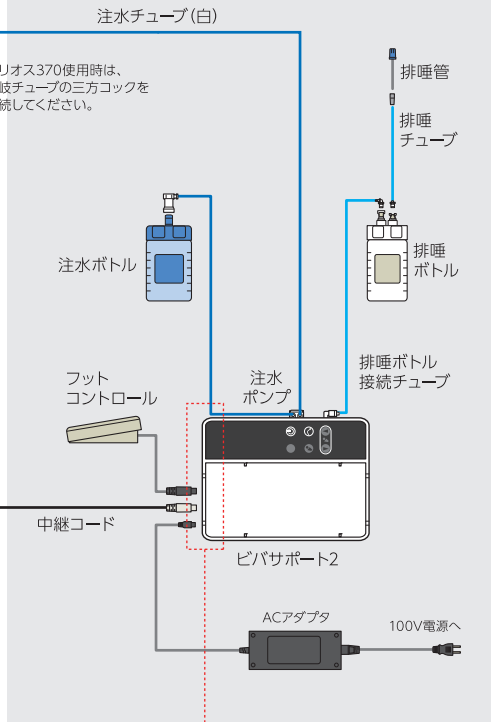

ビバサポート2 接続部側面図

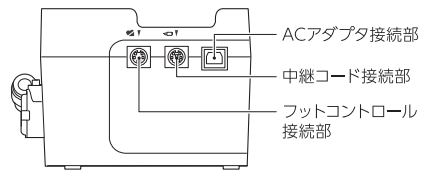

- 注1) バリオス370の注水は、オプションの「分岐チューブ」をご使用ください。
- 注2) ビバメイトG5とバリオス370と一緒に使用する場合は、中継コードを駆動させる機器にその都度押し替えて、ご使用ください。
- 注3) ビバメイトG5、バリオス370以外の機器と接続する場合は、注水チューブを該当機器のメーカー指定の方法にて接続してください。
- 注4) 接続する機器の操作方法については、各機器の取扱説明書をご覧ください。