

HYGIENE & MAINTENANCE

— メンテナンス & オートクレーブ —

iCare / iClave mini / PANA SPRAY Plus / EZ SPRAY

NSK

CREATE IT.

アイケア

iCare

 ハンドピース自動注油システム

日々の診療に不可欠な ハンドピースの自動注油システム

ハンドピースのタイプに応じて、適正な注油量がプリセットされており、簡単なボタン操作のみで、ハンドピースのメンテナンスが完了。

更にチャック清掃機能により、チャック内部の汚れや磨耗粉を効果的に取り除くことで、チャック由来のトラブルを未然に防ぎ、長期にわたりハンドピースをより良い状態に維持します。また、オイル注油量の最適化などにより、ランニングコストを低減します。




シンプル操作で、確実な注油

エアタービン・コントラアングル、それぞれに合わせた適切な注油量がプリセットされているため、ボタンを押すだけの簡単な操作で、ハンドピースの自動注油が行えます。




エアタービン

エアタービンは、エア回路、注水回路、およびチップエア（水を霧状にするためのエア）回路のすべてに注油されます。

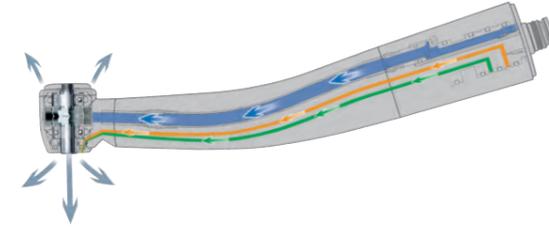

コントラアングル

コントラアングルは、ハンドピースのギアをモーターで回転させながら注油。複雑なギアの隅々まで確実にオイルを送り込むことが可能です。注水回路、チップエア（水を霧状にするためのエア）回路のすべてに注油されます。

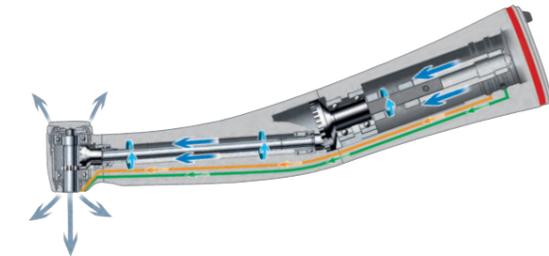

チャック清掃機能

付属のチャック清掃ノズルを使用することで、チャック内部の汚れや磨耗粉を取り除きます。



オイルミスト漏れを軽減(別売品)

ハンドピースヘッドフィルターを装着して注油を行うことで、オイルミスト漏れを軽減します。



エアーの吹き出し時間を選択

注油後、余剰オイルを排出するためのエアーの吹き出し時間を選択できるため、ハンドピースの使用環境やお好みに合わせたメンテナンスが可能です。



着脱が簡単な前面ドア

前面ドアを完全に取り外すことができるため、庫内のお手入れが簡単に行えます。




大型オイルタンク

iCareの大型タンク(1.2 L)は、メンテナンスオイル(1 L)を1回で補充できるため、余ったオイルの保管場所や、ボトルからのオイル漏れによる汚れの心配がなく、衛生的です。メンテナンス用ノズルを使用することで、上蓋から簡単・確実に補充できます。



スタイリッシュ&コンパクト

医院内での使いやすさを追い求めたiCareは、スタイリッシュでコンパクトなデザインのため、限られたスペースの中で効率よく設置できます。

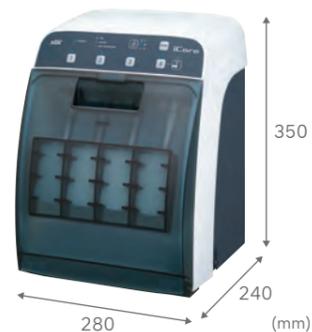

各社タービン装着用のアダプターを用意

各社のエアータービンもアダプター(別売品)をタービンジョイントの形状に合わせて装着するだけで、使用することができます。

アラーム機能で安全動作を実現

オイルの不足時やエアー圧の低減時など、本体の異常を自動で検知し、操作パネル上にLEDの点灯・点滅によるエラー表示をします。

iCare専用メンテナンスオイル

iCareの高い注油効果の実現に欠くことができない専用のメンテナンスオイルです(付属品)。お得な6本入りセットもご用意。

iCare 標準セット

コントラ2本、エアータービン2本 仕様



製品名: iCare C2 Type
製品番号: Y1002794
標準金額: ¥236,000

コントラ3本、エアータービン1本 仕様



製品名: iCare C3 Type
製品番号: Y1002795
標準金額: ¥254,000



セット内容

- iCare ユニット • 電源コード • iCare用メンテナンスオイル(1 L)
- ミストフィルターセット • エアーチューブ • オイルシート • チャック清掃用ノズル

仕様

- 電源: AC100 V 50/60 Hz
- 重量: 6.5 kg (C2タイプ/C3タイプ)
- タンク容量: 1.2 L
- 適正空気圧: 0.5-0.6 MPa (5.0~6.0 kgf/cm²)
- 寸法: W 280 × D 240 × H 350 mm

- エアータービン取付ジョイントはミッドウエスト4ホール・エアー配管が必要となります。(5.0-6.0 kgf/cm²)
- エアースケラー(弊社製Ti-Max S970 シリーズを除く)、およびパテラスエアーモーターはメンテナンスオイルが抜けない構造のため、本製品では使用できません。これらのハンドピースへ注油を行う場合は、各製品の取扱説明書に従って注油してください。
- 血液などがハンドピース内に浸入した場合は、パナスプレープラスでのメンテナンスをおすすめします。本製品では十分な洗浄が行えず、血液などが内部で凝固するなど故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品はハンドピース内部の洗浄を意図した製品ではありません。

iCare アダプター

製品名	製品番号	標準価格	
PTL アダプター	Z257010	¥10,000	• パテラス、マッハ用
B2/M4 アダプター	T904	¥6,600	• ボーテン2ホール用
KV アダプター	Z257020	¥10,000	• カボ用
SR アダプター	Z257023	¥10,000	• シロナ用
WH アダプター	Z257021	¥10,000	• W&H用
BA アダプター	Z280022	¥10,000	• ビエン・エア用
MT アダプター	Z257030	¥10,000	• モリタ用
MH アダプター	Z257048	¥10,000	• モリタ4H用
YS アダプター	Z257031	¥10,000	• ヨシダ用
YS-2 アダプター	Z257044	¥10,000	• ヨシダ用(ライト無し)
OS アダプター	Z257032	¥10,000	• オサダ用
OS-2 アダプター	Z257034	¥10,000	• オサダ用(ライト無し)
OS-4 アダプター	Z257038	¥10,000	• オサダ用(ライト付) • 排気回収タイプ
F-タイプアダプター	Z280042	¥10,000	• エンドメイト TC2 / iProphy ヘッド

タービンの種類によっては装着できないものもあります。販売店にご相談ください。

メンテナンスオイル

製品名: iCare用メンテナンスオイル 製品番号: Z016130 標準金額: ¥10,500

製品名: iCare用メンテナンスオイルセット(6本入り) 製品番号: Y1002783 標準金額: ¥60,000



パナスプレープラス

PANA SPRAY Plus ハンドピース潤滑油

「パナスプレープラス」には、アルコール含有の特殊な潤滑油が採用されており、タービン・コントラ等に内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、ハンドピースの寿命を延ばします。また、アルコール入りのため、スプレー使用時の潤滑油による手のべたつきも軽減され、より使いやすくなっています。

製品名：パナスプレープラス 製品番号：Z182100 標準金額：¥4,700

・タービン、ハンドピース用 ・480 mL ・アルコール含

製品名：パナスプレープラス6本セット 製品番号：Y900630 標準金額：¥24,000

製品名：チップノズル 製品番号：Z020010 標準金額：¥200



パナスプレープラス用ノズル

製品名	製品番号	標準価格
パテラス スプレーノズル ・パテラスカップリング式 エアータービン/モーター用	P183090	¥1,000
スプレーノズル(KV) ・KaVo® MULTIflex® LUX カップリング用	Z090051	¥1,500
スプレーノズル(SR) ・Sirona® Quick カップリング用	Z090052	¥1,500
スプレーノズル(WH) ・W&H® Roto Quick カップリング用	Z090054	¥1,500
スプレーノズル(BA) ・Bien-Air® Unifix® カップリング用	Z090053	¥1,500
スプレーノズル(ML) ・モリタαメインチューブ用	Z090055	¥1,500
スプレーノズル(YS) ・ヨシダクイックジョイント用	Z090057	¥1,500
スプレーノズル(FL) ・オサダフラインジョイント用	Z090062	¥1,500
E-タイプ スプレーノズル ・E-タイプ用*	Z019090	¥1,000
サージカルスプレーノズル ・E-タイプ用* ・SGM-I / SGMS-Iヘッド用	Z114090	¥1,000
F-タイプ スプレーノズル ・エンドメイト TC2 / iProphy / iSD900ヘッド用	Z256090	¥1,000

*ISO3964準拠品

スプレーミスト吸収パック

スプレーによるハンドピースの注油時、ミスト状のオイルが飛散し、周囲を汚す可能性があります。このスプレーミスト吸収パックにより、オイルミストを効果的に吸収し、診療室をクリーンに維持できます。また、手にもオイルが付着しないため、ハンドピースのメンテナンスを楽に行えます。



製品名：スプレーミスト吸収パック
製品番号：Y900084 標準金額：¥4,700


・10/パック入り



イーゼースプレー

EZ SPRAY 潤滑スプレーアシスタント

EZスプレーは、スプレーグリップとハンドピースを確実に装着してオイルの洗浄・注油が行えるので、人によるバラつきがなく、誰がやっても簡単・確実にオイルメンテナンスが行えます。また、各社のエアータービンハンドピースをご使用いただく場合は、各社タービン装着用アダプターセットをご使用ください。

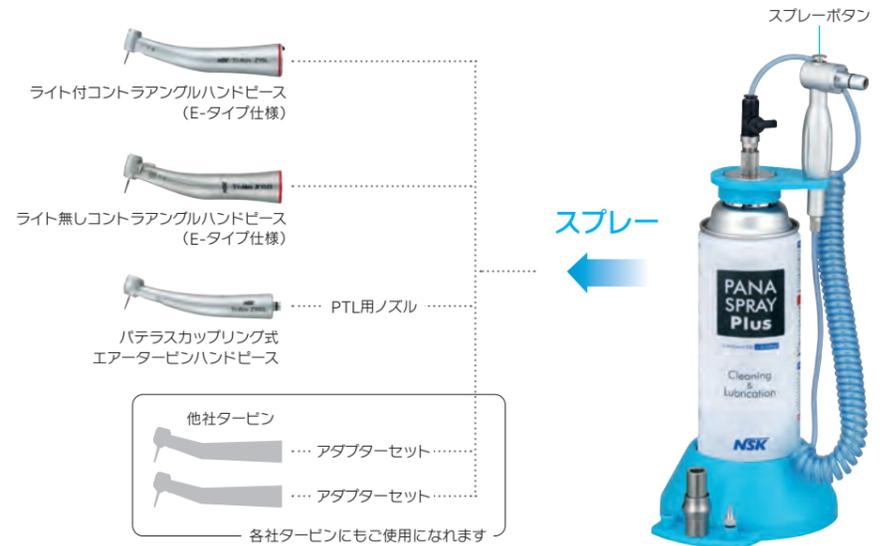

製品名：EZスプレー標準セット 製品番号：Y900070 標準金額：¥24,000

セット内容：
・EZスプレーグリップ ・コイルチューブ ・グリップホルダー ・缶ホルダー
・切換バルブ ・PA用ノズル ・スプレーミスト吸収パック(1/パック)

ナカニシのパナスプレープラス専用です。
パナスプレープラスは付属しておりません。

各社タービン装着用アダプターセット(各社用アダプター + EZ-M4アダプター)

製品名	製品番号	標準価格	
EZ-KVアダプターセット	Y150007	¥15,000	・KV アダプター(カボ用) ・EZ-M4 アダプター
EZ-SRアダプターセット	Y150010	¥15,000	・SR アダプター(シロナ用) ・EZ-M4 アダプター
EZ-WHアダプターセット	Y150008	¥15,000	・WH アダプター(W&H用) ・EZ-M4 アダプター
EZ-BAアダプターセット	Y150009	¥15,000	・BA アダプター(ビエン・エア用) ・EZ-M4 アダプター
EZ-MTアダプターセット	Y150011	¥15,000	・MT アダプター(モリタ用) ・EZ-M4 アダプター
EZ-YSアダプターセット	Y150012	¥15,000	・YS アダプター(ヨシダ用) ・EZ-M4 アダプター
EZ-YS2アダプターセット	Y150015	¥15,000	・YS-2 アダプター(ヨシダ用ライト無し) ・EZ-M4 アダプター
EZ-OSアダプターセット	Y150013	¥15,000	・OS アダプター(オサダ用) ・EZ-M4 アダプター
EZ-OS2アダプターセット	Y150017	¥15,000	・OS-2 アダプター(オサダ用ライト無し) ・EZ-M4 アダプター
EZ-OS4アダプターセット	Y150019	¥15,000	・OS-4 アダプター(オサダ用ライト付/排気回収タイプ) ・EZ-M4 アダプター

タービンの種類によっては装着できないものもあります。販売店にご相談ください。

マルチスタンド 135℃ SSS

ナカニシのマルチスタンドは、タービン、コントラアングルハンドピース等の注油後の保管に便利です。ハンドピースと一緒に135℃でオートクレーブ可能です。



製品名：マルチスタンドフルセット
製品番号：Z036
標準金額：¥5,000

パテラスエアータービン/モーター用、E-タイプ*コントラ用
 ・スタンド用ポスト(A)×5個
 ・スタンド用ポスト(B)×5個
 ・スタンド用ポスト(C)×4個



製品名：マルチスタンドパテラス用
製品番号：Z036002
標準金額：¥3,500

・スタンド用ポスト(A)×3個
 ・スタンド用ポスト(C)×2個

マルチスタンド用ポスト 135℃ SSS

製品名	製品番号	標準価格	
 スタンド用ポスト(A)	Z036201	¥200	・パテラス エアータービン用 ・パテラス モーター用
 スタンド用ポスト(B)	Z036202	¥200	・E-タイプ* コントラ用
 スタンド用ポスト(C)	Z036203	¥200	・パテラスカップリング用 ・マツハカップリング用
 スタンド用ポスト(KV)	Z036204	¥200	・カボ エアータービン用
 スタンド用ポスト(SR)	Z036205	¥200	・シロナ エアータービン用
 スタンド用ポスト(WH)	Z036207	¥200	・W&H エアータービン用
 スタンド用ポスト(BA)	Z036206	¥200	・ビエン・エア エアータービン用
 スタンド用ポスト(MT)	Z036208	¥200	・モリタ エアータービン用
 スタンド用ポスト(FL)	Z036213	¥200	・オサダフアインジョイント用
 スタンド用ポスト(F)	Z036209	¥200	・エンドメイト TC2 / iProphy / iSD900 ヘッド用

* ISO3964準拠品

スペアパーツ

SPARE PARTS

iCare

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
ミストフィルター セット (12個入り)		Y900159	¥1,800	エアフィルター		U508352	¥5,600	ハンドピースヘッド フィルター (200個入り)		U1120118	¥4,600
オイルシート (10枚入り)		U433135	¥1,000	チャック清掃用 ノズル		Z257301	¥1,600				

iClave mini

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
ヒューズ (15A)		D1200415 020	¥300	フックハンドル		U1159105	¥4,000	給水フィルタ		U1159108	¥2,500
バスケット		U1159101	¥15,000	フィルタスパナ		U1159106	¥2,500	エアフィルタ		U1159109	¥8,000
仕切りスタンド		U1159102	¥4,000	水フィルタ		U1159107	¥1,500	パッキン		U1159110	¥5,000
仕切り板(長)		U1159103	¥1,500	フィルタ受け		105321	¥1,500	チューブストッパ		U1159111	¥700
仕切り板(短)		U1159104	¥1,000								

EZスプレー

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
EZスプレー グリップ		Z229011	¥14,000	缶ホルダー		Z229020	¥3,800	PA用ノズル		Z229030	¥1,600
コイルチューブ		Z229135	¥1,500	切換バルブ		Z229017	¥3,800	PTL用ノズル		Z229035	¥4,700
グリップホルダー		Z229201	¥800	EZ-M4 アダプター		Z229040	¥5,000	Oリング グリップ用		D0312060 100	¥300

KaVo®(カボ)とMULTiflex® LUX(マルチフレックス)は、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
 Sirona®(シロナ)は、Sirona Dental Systems GmbHの登録商標です。
 W&H®は、W&H Dentalwerk Bürmoos GmbHの登録商標です。
 Bien-Air®(ビエン・エア)とUnifix®(ユニフィックス)は、Bien-Air Dental S.A.の登録商標です。
 カスタムエアアー®は(株)モリタ東京製作所の登録商標です。

 熱水洗浄可能 135℃
SSS 135℃までの温度で
オートクレーブ可能

株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289-64-3380
FAX: 0289-62-5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL: 03-5828-4180
FAX: 03-5828-0064

大阪事務所 〒530-0057
大阪市北区曽根崎2-12-7
清和梅田ビル 10F
TEL: 06-6315-7217
FAX: 06-6315-7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
受付時間(土日祝日を除く)
9:00~17:00 ☎ 0120-7242-56
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでも
お気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

