


■パテラスカップリング式 エアータービン, モーター用



■E-タイプ用※



■エンドメイト TC2 / iProphy / iSD900 ヘッド用

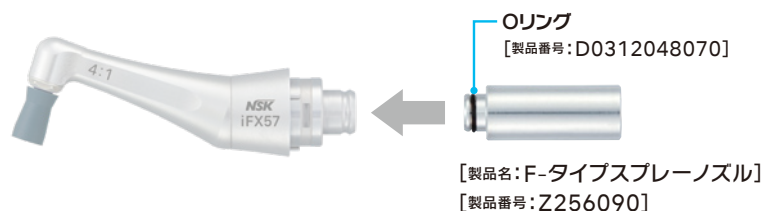

各患者の治療後、またはオートクレーブ滅菌前には、必ずパナスプレープラスで注油を行ってください。その際オイルの周囲への飛散を防ぐため、必ずハンドピースを布等で覆ってください。パナスプレープラスをご使用する前はスプレー缶を3～4回よく振ってからご使用ください。



スプレーノズルをハンドピース後部へ挿し込み、ハンドピースを押さえて、ハンドピース先端よりオイルが出るまで2～3秒スプレーします。注油は先端から異物等の汚れが出なくなるまで繰り返し行います。



【製品名: パナスプレープラス】
【製品番号: Z182100】
エアータービン, ハンドピース用
480 mL アルコール含

Oリング
 [製品番号: D0312040080]
 [製品番号: D0318060080]



KaVo® Multiflex® カップリング用
 [製品名: スプレーノズル(KV)]
 [製品番号: Z090051]

Oリング
 [製品番号: D0318060080]



Sirona® Quick coupling用
 [製品名: スプレーノズル(SR)]
 [製品番号: Z090052]

Oリング
 [製品番号: D0312015080]
 [製品番号: D0318060080]
 [製品番号: D0312063080]



W&H® Roto Quick カップリング用
 [製品名: スプレーノズル(WH)]
 [製品番号: Z090054]

Oリング
 [製品番号: D0312015080]
 [製品番号: D0312063080]



Bien Air® UNIFIX® カップリング用
 [製品名: スプレーノズル(BA)]
 [製品番号: Z090053]

Oリング
 [製品番号: D0312044080]
 [製品番号: D0312060080]
 [製品番号: D0312069070]



モリタαメインチューブ用
 [製品名: スプレーノズル(ML)]
 [製品番号: Z090055]

Oリング
 [製品番号: D0312044080]
 [製品番号: D0312074080]



モリタTwin Power Turbine 4H カップリング用
 [製品名: スプレーノズル(MHL)]
 [製品番号: Z090056]

Oリング
 [製品番号: D0312060080]



ヨシダクイックジョイント用
 [製品名: スプレーノズル(YS)]
 [製品番号: Z090057]

Oリング
 [製品番号: D0312054080]
 [製品番号: D0312063080]



オサダファインジョイント用
 [製品名: スプレーノズル(FL)]
 [製品番号: Z090062]

Oリング
 [製品番号: D0312074080]



パテラス用、モーターヘッド用
 [製品名: パテラス コントラノズル]
 [製品番号: M070090]
 パテラススプレーノズルの先端に取り付けて使用します

Oリング
 [製品番号: D0312080100]



E-タイプ®用、SGM-I / SGMS-I ヘッド用
 [製品名: サージカルスプレーノズル]
 [製品番号: Z114090]
 ※ISO3964準拠品

Oリング
 [製品番号: D0312060100]
 [製品番号: D0312070100]
 [製品番号: D0312080100]



トルクコンバーター用
 [製品名: トルクコンバータノズル]
 [製品番号: Z172910]