

**重 要**

ハンドピースの故障や内部部品が消耗・破損した状態（バーの振れ、振動、音、発熱等の異常）で使用すると、回転中にヘッド部等が発熱し、口腔内の火傷を引き起こす恐れがあります。以下の点に注意して使用してください。

**使用上の警告・注意****警告**

- ハンドピース内のボールベアリングは消耗品です。使用する前に、必ず点検を行ってください。振動、音の異常があった場合はベアリング等の内部部品が消耗・破損している恐れがありますので、販売店まで連絡してください。
- 回転中、プッシュボタンを押さないように注意してください。口腔内の軟組織に触れた場合、火傷する恐れがあります。
- 治療が終わりましたら必ずすぐに、洗浄、注油、滅菌を行ってから保管してください。
- ハンドピース内の汚れ等の排出およびベアリング等を潤滑するために、必ず注油を行ってください。

**注意**

- 落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 取扱説明書の指示に従ったバーを使用してください。
- バーに過度の負荷をかけて使用しないでください。
- 使用中、少しでも異常を感じたら使用を中止して、販売店まで連絡してください。


**使用前点検**

使用する前に、口腔外で以下の点検を行ってください。


- 1 ヘッドキャップの緩みがないこと
- 2 回転させ、バーの振れ、振動、音等に異常がないこと
- 3 回転停止後、ヘッド部に異常な発熱がないこと

ヘッドキャップの緩みおよび異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、販売店まで修理を依頼してください。

緩み確認

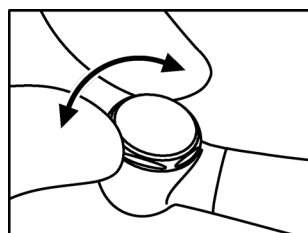

発熱確認

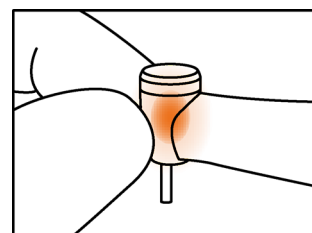**お知らせ**

- ハンドピースのメンテナンス方法（洗浄、注油、滅菌）は、ウェブサイトから閲覧できます。



メンテナンス  
ガイド



メンテナンス動画  
エアータービン



メンテナンス動画  
コントラアングル